

Avdeling for Laboratoriemedisin

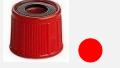
EQS21812
v1.10

Prøvetakingsveiledning for prøver til Medisinsk Biokjemi,
Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

Vår laboratoriehåndbok finnes på internett; <http://www.hnt.no/laboratoriemedisin>.

Se også Sendep prøver med oversikt over de prøver vi sender til andre laboratorier.

Analysér merket # er akkrediterte analyser.

KJEMISKE ANALYSER		PROTEINER	HEMATOLOGI
●●😊 Natrium # ●●😊 Kalium # ●●😊 Klorid # ●●😊 Kalsium # ●●😊 Fosfat # ●●😊 Magnesium ●●😊 Kreatinin # ●●😊 Karbamid # ●● Osmolalitet Eget gelrør ●●😊 RF (Rheuma Faktor) # ●●😊 anti CCP# ●●😊 Kolesterol # ●●😊 HDL-Kolesterol # ●●😊 LDL-Kol# ●●😊 Triglyc. # Fastende ●● Monotest Eget gelrør ●●😊 Urat # ●●😊 Bilirubin # ●●😊 ASAT # ●●😊 ALAT# ●●😊 LD # ●●😊 ALP # ●●😊 GT # ●●😊 CK # ●●😊 Amylase # ●●😊 Lipas# ●●😊 Jern # TIBC og Transferrin# ●●😊 Ferritin # ●●😊 Vitamin D# ●●😊 Vitamin B12 # ●●😊 S-Folat# ●●😊 S-β-hCG# ●● S-NT proBNP Eget gelrør* ●● S-C peptid Eget gelrør* *C peptid og NT proBNP kan evt dele rør Homocystein EDTA rør m gel Sentrifugering innen 30 minutter Se lab handbok for holdbarhet før avpipettering		●●😊 Protein (total) # ●●😊 Albumin # ●● Frie lette kjeder Eget gelrør ●● Prot. elektroforese Eget gelrør ●●😊 IgA# ●●😊 IgG# ●●😊 IgM# ●●😊 CRP#	● Hematologistatus Innen 4d. på lab (Hb #, LPK #, TPK #) ● Hemoglobin (Hb) # Innen 4d. på lab ● Leukocytter LPK # Innen 4d. på lab ● Trombocytter TPK# Innen 4d. på lab ● LPK m/diff Innen 72 timer ● Nøytrofile Innen 2-4d ● Eosinofile Innen 2-4d. ● Erytrocytter EPK # Innen 4d. på lab ● MCV# Innen 8 t på lab ● MCH # Innen 4d. på lab ● Reticulocytter Innen 3d. på lab ● Blodutstryk Lages innen 6 timer Ett EDTA-rør til alle hem analyser. Anbefaler kjølign oppbevaring!
		HORMONER	KOAGULASJON
		●●😊 Fritt T4 # ●●😊 Fritt T3# ●●😊 TSH # ● PTH#+ Se lab.håndbok ● Ion-Ca Eget uåpnet gelrør	● PT-INR # Innen 2døgn på lab
		MEDIKAMENTER	
		●● Salicylat og Paracetamol ●● Digoxin ●● Litium	
		CANCERMARKØRER	
		●● PSA# ●● CEA ●● CA125	
		URIN og FÆCES	BLODBANK
		- U-Natrium # - U-Kalium # - U-Karbamid # - U-Kreatinin # - Krea.Clearance Oppgi diurese * - U-Osmolalitet - U-Protein - U-Mikro alb.#Oppgi diurese * - U-Albumin/kreatinin ratio/(ACR) * Samletid og volum/(PCR) - U-Elektroforese Døgn-/morgenurin	● Blodgruppe (AB0) #/Rh(D)# ● Antistoffscreening # ● Dir. Coombs # Eget EDTA-rør
			SEROLOGI
			●● Hep Bs Ag + Core As # ●● Hep Bs As # ●● Hep C As # ●● HIV Ag/As # ●● Syfilis# ●● Rubella # To rør til HepB, C og HIV evt ett langt gelrør dersom det er tilgjengelig
Symbol		Materiale	Prøvetakingsveiledning
	SERUM Rød kork m/gul ring	● Rør med rød kork med gul ring (med gel): Sentrifuger etter 30 min og innen 2 t og send gel-røret	
	SERUM Rød kork m/sort ring	● Rød kork (uten gel): Sentrifuger, avpipetter innen 2 timer og send serum OBS!! Hemolyse; Sterk hemolyse kan innvirke på enkelte analyser. Analyser merket med 😊 analyseres på samme instrument. Det er nok med serum fra ett rør til disse analysene . Analysér uten 😊 trenger eget(egne) rør.	
😊			
●	EDTA-BLOD	● Lilla kork m/svart ring Skal IKKE sentrifugeres !	
●	CITRAT-BLOD	● Lyseblå kork m/svart ring Skal IKKE sentrifugeres !	
Rutiner for innsending av prøver: De til enhver tid gjeldende rutiner for innsending av prøver legger føringer for hvordan håndtere og oppbevare prøver ved legekantoret i påvente av sending. Sjekk labhåndbok for holdbarhet og forskriftsmessig oppbevaring og ta evt kontakt ved spørsmål, telefon 7409 8137			

Hvordan brukes prøvetakingsveiledningen?

- Veiledningen er ment til personale som tar blodprøver
- Et symbol foran analysen viser type prøvetakningsrør
Utfyllende opplysninger om symbolene finnes nederst på arket
- Fargene på symbolene er lik korkene/ringen på korkene på prøverørene.
- Ved avpipettering, anmerk hvis det er annet prøvemateriale enn serum, for eksempel urin eller plasma.
- Bak analysen står stikkord i rødt som hjelp ved prøvetakningen
- Prøvetakingsrør og rekvisisjon fra en pasient sendes i samme konvolutt.
- Når fargene falmer over tid kan ny veiledning bestilles ved laboratoriets ekspedisjon til Avdeling for Laboratoriemedisin, Medisinsk Biokjemi, (74 09 81 37, Sykehuset Levanger og 74 21 56 43, Sykehuset Namsos)
- Prøvetakingsveiledningen finnes også på hjemmesiden, <http://www.hnt.no/laboratoriemedisin>.