

ALM-IKT-L	<h1>RoS Blodgasser</h1>	Gyldig fra: Se EQS
Side 1 av 1		Godkj: Se EQS
EQS-dok: 18008 (v 1.3)		Utskriftsdato: 22.03.2024

Ved avdeling:

- Skal bestilles i RoS **før** analysering!
- Bestilles fortrinnsvis av den pasientansvarlig spl. (pga at ikke alle skal inn i pasientens journal!).
- Bestilles på eget prøvenummer, **ikke** sammen med andre blodprøver. Dette er en egen prøvetaking.
- Trykk på analysepakkene under «Blodgass, elektrolytter og nyre»
- Før inn i «Kliniske opplysninger» med/uten O₂, antall liter og lignende.
- Trykk «**Send**». Etiketter skrives ut på valgt etikettskriver.

Ved pasient:

- Klistre etikett på blodgass-sprøyte.

På analysator:


Analysering i FLEX-mode

- Plasser SafePICO sprøyta i et spor på brettet.
- I feltet Lab.nr: Skann strekkode med prøvenummer.
- Velg riktig prøvemateriale: Arteriell eller Venøs



Etikettklistring på utskrifter:

Kopi (til lege)

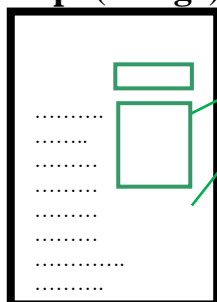

Klistre på navn/fnr
skriv på med eller uten O₂

Registreringsark



Klistre signeringslapp (signert og
med riktig prøvetidspunkt) + navn/fnr