


Bruksanvisning


Vernacare Vaskefat



1 Ta Vaskefat fra stativ

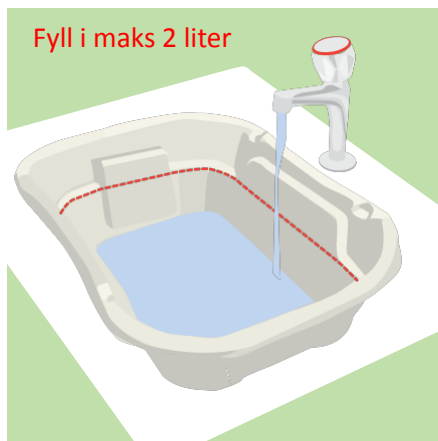

2 Fyll med varmt vann (maks temp 45°C) (Maks kapasitet 4 liter)

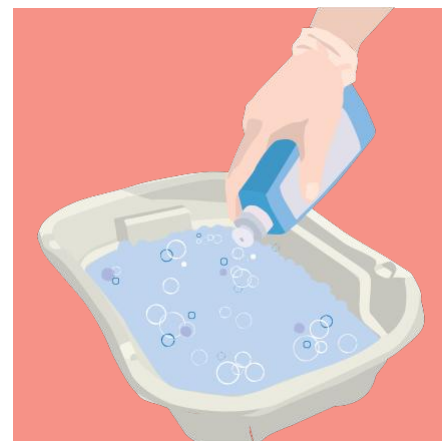

3 Tilsett såpe



4 Bruk håndtakene når du bærer



Plasseres i maskinen for destruering

5 Kastes i Vernacare maskin
Maks 2 stk per gang.

Varenummer:

Beskrivelse:	Maske Varenummer	Vernacare Varenummer
Eske med 100 stk vaskefat	4271322	118AA0100
Holder til Vaskefat	4271315	510ZS001

For spørsmål ring Maske Gruppen 99040395 eller 02120

MASKE

SLIK BRUKER DU

VERNACARE ENGANGSSYSTEM

Maske Gruppen har satt opp denne listen for å gjøre det litt enklere for den ansatte å bruke engangssystemet på riktig måte.

Vortex destruksjonsmaskin

Vernacare destruksjonsmaskinen kan ta **opp til 2** engangsprodukter per syklus.

Trykk **alltid** på start knappen med en gang, selv om du legger i kun ett produkt (maskinen bruker bare 2 min.)

I maskinen skal det kun kastes engangsartikler og toalettpapir.

Husk at det du kaster i maskinen, skal ut i kloakksystemet.



Daglig renhold

Det bør være daglig renhold av maskinens lokk, topp og pakning. Ved smitte på avdelingen må godkjent desinfeksjonsmiddel brukes.

Kjør også gjennom maskinen daglig med kun vann.




Vernagel

Ved bruk av Vernagel kan mange unødvendige sengeskift forhindres. Vernagel anbefales å brukes i urinflasker og i bekken på natten, og til pasienter som har en tendens til å søle ofte. Pulveret fjerner sterk urinlukt, absorberer urinen slik at den stivner og blir til gele, og bekkenet/urinflasken kan derfor bli stående over natten. Hele posen legges i urinflasken.

Fremgangsmåte engangssystem

Pasienter som trenger bekken, har en egen plaststøtte på rommet, som brukeren har tilgjengelig under hele oppholdet. Engangsbekkenet dekker støtten, slik at støtten ikke trenger å vaskes etter hver gang bekkenet har blitt brukt. Støtten vaskes når pasienter er ferdig med å bruke bekkenet, eller ved behov.

Det er kun engangsbekken med lokk eller pose som skal forlate rommet, og kastes direkte i Vernacare destruksjonsmaskin.

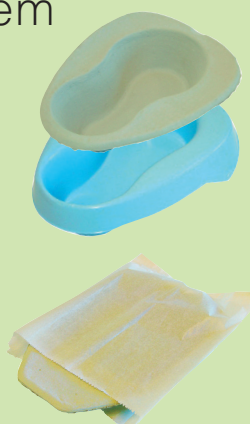

Andre tips og fakta

- For veiing/ måling av urin, brukes en digital vekt (1 ml = 1 gram), men husk da å trekke ifra urinflasken eller bekkenets vekt.
- For sjekking av farge på urin, må urinen tømmes over i noe annet, eller direkte i maskinen.
- Vaskefatene er garantert å holde på vann i opptil 2 timer, hvis vannet ikke overstiger 45°C.



Ved driftsstans

**Kontakt Service Tech AS,
Telefon: 988 87 222.**

Hvis dere har andre spørsmål ang. Vernacare engangssystem, så ta gjerne kontakt:
Tlf: 02120 - Mobil: 99 04 03 95
E-mail: morten.eide@maske.no