

TERUMOBCT


Trima Accel[®] automatisert blodoppsamlingsystem
Systemmelding referanse
til bruk med brukerhåndbok for versjon 7.0

Delenr. 777095-617
2018-09

©2018 Terumo BCT, Inc.



Terumo BCT, Inc.
10811 W. Collins Avenue
Lakewood, Colorado 80215
USA
Telefon USA: +1.877.339.4228
Telefon: +1.303.231.4357
Faks USA: +1.866.715.6768
Faks: +1.303.542.5215

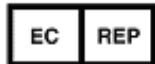

Terumo BCT Europe N.V.
Ikaroslaan 41
1930 Zaventem
Belgia
Telefon: +32.2.715.05.90
Faks: +32.2.721.07.70

TERUMOBCT.COM

Innhold

Rådgivende meldinger	7
Bytt PAS-posen	7
Dobbel RBC oppdelingsadvarsel	7
Erstatt RBC-tilsetningsløsningsposen (86)	7
Erstatt RBC-tilsetningsløsningsposen (87)	8
Kan ikke identifisere slangesettype	8
RBC oppdaget	9
Tilkoble erstatningsløsning (114)	9
Tilkoble erstatningsløsning (115)	9
Tilkoble erstatningsløsning (116)	10
Tilkoble erstatningsløsning (117)	10
Varsler	11
AC-frakobling mislyktes	11
AC-frakoblingsfeil	11
AC-slange blokkeringsfeil	12
Donasjonstid økning (163)	12
Donasjonstid økning (176)	13
Ett minuttspause	13
Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen (35)	14
Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen (36)	14
Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen (170)	14
Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen (171)	15
Feil på priming av RBC-tilsetningsløsning (80)	15
Feil på priming av RBC-tilsetningsløsning (81)	15
Første syklus feil	16
Giver frakobling-bekreftelsesfeil (52)	16
Giver frakobling-bekreftelsesfeil (55)	17
Giver-frakoblingsfeil (53)	18

Giver-fracoblingsfeil (54)	19
Inntakstrykket for lavt (18)	20
Inntakstrykket for lavt (25)	21
Inntakstrykket for lavt (164)	22
Kassettfeil	23
Lav blodplatekonsentrasjon registrert (78)	23
Lav blodplatekonsentrasjon registrert (186)	23
Lekkasje detektorfeil	24
Lekkasje registrert	24
Lekkasjetestfeil	25
Luft registrert på AC-sensor	25
Maksimum prosedyretid er oversteget (168)	26
Maksimum prosedyretid er oversteget (177)	26
Maskinvare mislyktes	27
Motorsvikt (90)	27
Motorsvikt (156)	28
Motorsvikt (157)	28
Motorsvikt (158)	29
Mulig WBC kontaminasjon registrert (150)	29
Mulig WBC kontaminasjon registrert (174)	30
Nivåsensorfeil (118)	30
Nivåsensorfeil (120)	31
Nivåsensorfeil (121)	31
Nivåsensorfeil (122)	32
Nivåsensorfeil (123)	32
Nivåsensorfeil (124)	33
Nivåsensorfeil (125)	34
Nivåsensorfeil (126)	35
Nivåsensorfeil (127)	35
Nivåsensorfeil (128)	36
Nivåsensorfeil (129)	37
Nivåsensorfeil (130)	38
Nivåsensorfeil (131)	39
Nivåsensorfeil (132)	39
Nivåsensorfeil (133)	40
Nivåsensorfeil (178)	40
Overføringslangefeil	41
PAS primingsfeil (82)	41
PAS primingsfeil (83)	42
PAS primingsfeil (167)	43

Pumpefeil	43
Pumper pauset	44
RBC-detektorfeil	44
RBC-filtertrykk høyt (21)	45
RBC-filtertrykk høyt (23)	45
RBC-filtertrykk høyt (24)	46
RBC-filtertrykk høyt (165)	46
Returtrykket for høyt (16)	47
Returtrykket for høyt (19)	48
Returtrykket for høyt (135)	49
Sentrifugedør ikke lukket (57)	50
Sentrifugedør ikke lukket (183)	50
Sentrifugedør åpen	51
Sentrifugehastighetsfeil	51
Sentrifugen mislyktes	51
Sentrifugen stoppet	52
Sentrifugetemperaturfeil	52
Sentrifugetrykk høyt (47)	53
Sentrifugetrykk høyt (49)	53
Sentrifugetrykk ligger utenfor område	54
Sentrifugetrykkfeil	54
Slangesettfeil	55
Slangesetttypefeil (28)	55
Slangesetttypefeil (30)	55
Strømbrudd (104)	56
Strømbrudd (105)	56
Strømtesten mislyktes	56
Systemtrykk høyt (40)	57
Systemtrykk høyt (41)	57
Systemtrykk høyt (42)	58
Systemtrykk høyt (43)	58
Systemtrykk høyt (44)	59
Systemtrykk høyt (48)	59
Systemtrykk høyt (1078)	60
Ta ut kassett-feil	60
Ti minutterspause	61
Tiltak kreves	61
Tre minutters pause	61
Trykklettelsesfeil	62
Trykksensoren mislyktes	62

Trykktestfeil (1)	63
Trykktestfeil (2)	64
Trykktestfeil (60)	65
Trykktestfeil (63)	66
Trykktestfeil (64)	67
Trykktestfeil (65)	68
Trykktestfeil (154)	69
Trykktestfeil (184)	70
Trykktestfeil (185)	71
Ventilfeil (38)	72
Ventilfeil (103)	72
Ventilfeil (113)	73
Ventilfeil (147)	73
Ventilfeil (148)	74
Væske registrert på AC-sensor	74
Alarmer	75
Systemtest mislyktes	75
Spenningsfeil	76
(4) AC-fracobling mislyktes	77
(5) Væske på AC-sensor mislyktes	77
(6) Væske ikke registrert på AC-sensor	77
(10) Blokkert AC-slange mislyktes	78
(11) Tilgang trykksensor mislyktes	78
(12) Tilgang trykksensor mislyktes	78
(13) Tilgang trykksensor mislyktes	79
(22) RBC-filtertrykk høyt	79
(33) Sentrifugen mislyktes	79
(37) Sentrifugeposevolum for høyt	80
(46) Systemtrykk høyt	80
(61) Trykktest mislyktes	80
(68) Første syklus mislyktes	81
(71) Sentrifugeposevolum for høyt	81
(75) Væske registrert før priming mislyktes	81
(76) Sensor for lavt nivå mislyktes	82
(77) Væske registrert for raskt	82
(93) Sentrifugetemperaturfeil	83
(96) RBC overløp	83
(106) Strømbrydd	84
(109) AC-priming mislyktes	84
(134) Nivåsensor mislyktes	84

(142) Ti minutterspause	85
(143) Nivåsensor mislyktes	85
(144) Nivåsensorfeil	85
(145) Nivåsensor mislyktes	86
(149) Blodpriming mislyktes	86
(162) Trykktestfeil	86
(179) Inntakslange okklusjon oppdaget	87
(187) Nivåsensorfeil	87
(1060) Oppstart mislyktes	87
(1087) Oppsamlingsventil for lenge åpen	88
(32781) Sentrifugehastighet mislyktes	88
(32782) Sentrifugen mislyktes	88
(32783) Ventilsensor eller dørsensor mislyktes	89
(32784) Nivåsensor mislyktes	89
(32787) Sensor for lavt nivå mislyktes	90
(32788) Inntakspumpe mislyktes	90
(32789) Inntakspumpe mislyktes	91
(32790) Returpumpe mislyktes	91
(32791) Returpumpe mislyktes	92
(32792) AC-pumpe mislyktes	92
(32793) AC-pumpe mislyktes	93
(32794) Plasmapumpe mislyktes	93
(32795) Plasmapumpe mislyktes	94
(32796) Blodplatepumpe mislyktes	94
(32797) Blodplatepumpe mislyktes	95
(32802) Sentrifugedør ikke lukket	95
(32803) Kassetheving mislyktes	96
(32804) Priming mislyktes	96
(32811) AC-pumpe mislyktes	97
(32812) Ventilfeil	97
(32813) Ventilfeil	98
(32814) Ventilfeil	98
(32819) Første syklus mislyktes	99
(32820) Kassett mislyktes	99
(32821) AC-pumpe bevegelse mislyktes	99
(32823) Returpumpe mislyktes	100

Indeks

Rådgivende meldinger

Bytt PAS-posen

Statuslinje	Bytt PAS-posen
Meldingsnummer	84
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	PAS-posen er nesten tom. 1. Koble til en ny pose 2. Bryt brekkstiften på posen 3. Bekreft at klemmen på PAS-slangen er åpen Trykk på 'Fortsett.'

Dobbel RBC oppdelingsadvarsel

Statuslinje	Dobbel RBC oppdelingsadvarsel
Meldingsnummer	59
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Kjør Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	1. Lukk igjen slangen på posen som inneholder RBC 2. Åpne slangen for å tømme RBC-posen 3. Trykk på 'Fortsett'

Erstatt RBC-tilsetningsløsningsposen (86)

Statuslinje	Erstatt RBC-tilsetningsløsningsposen
Meldingsnummer	86
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	RBC-tilsetningsløsningsposen er nesten tom. 1. Koble til en ny pose 2. Bryt brekkstiften på posen Trykk på 'Fortsett.'

Mer informasjon 1	RBC-tilsetningsløsningsposen er nesten tom. 1. Koble til en ny pose 2. Bryt brekkstiften på posen Trykk på 'Fortsett.'
--------------------------	---

Erstatt RBC-tilsetningsløsningsposen (87)

Statuslinje	Erstatt RBC-tilsetningsløsningsposen
Meldingsnummer	87
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	RBC-tilsetningsløsningsposen er nesten tom. 1. Lukk igjen klemmen på en slange 2. Koble til en ny pose til en åpen slange 3. Bryt brekkstiften på posen Trykk på 'Fortsett.'
Mer informasjon 1	RBC-tilsetningsløsningsposen er nesten tom. 1. Lukk igjen klemmen på en slange 2. Koble til en ny pose til en åpen slange 3. Bryt brekkstiften på posen Trykk på 'Fortsett.'

Kan ikke identifisere slangesettype

Statuslinje	Kan ikke identifisere slangesettype
Meldingsnummer	138
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet kunne ikke identifisere slangesettet som var tilkoblet. For å fortsette, trykk på 'Ta ut sett' for å heve kassetten. Bekreft at det ikke er blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen. eller Bekreft REF og trykk på 'Fortsett.' Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

RBC oppdaget

Statuslinje	RBC oppdaget
Meldingsnummer	175
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet registrerte RBC i blodplateslangen. - Bekreft at korrekt HCT/Hb for giver er angitt

Tilkoble erstatningsløsning (114)

Statuslinje	Tilkoble erstatningsløsning
Meldingsnummer	114
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Den valgte prosedyren krever erstatningsløsning. Koble til saltvannsposen og trykk på 'Fortsett.'

Tilkoble erstatningsløsning (115)

Statuslinje	Tilkoble erstatningsløsning
Meldingsnummer	115
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Du har valgt å gi en bolus av saltvann til giveren. - For å levere en saltvannsbolus, koble til saltvannsposen og trykk 'Fortsett' - For å fortsette uten en saltvannsbolus, trykk 'Avbryt'

Tilkoble erstatningsløsning (116)

Statuslinje	Tilkoble erstatningsløsning
Meldingsnummer	116
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Koble til saltvannsposen og trykk på 'Fortsett.'

Tilkoble erstatningsløsning (117)

Statuslinje	Tilkoble erstatningsløsning
Meldingsnummer	117
Meldingstype	Rådgivende melding
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Tilbakeføringsprosedyren krever saltvannsløsning. Koble til saltvannsposen og trykk på 'Fortsett.'

Varsler

AC-fracobling mislyktes

Statuslinje	AC-fracobling mislyktes
Meldingsnummer	151
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke verifisere at AC er sveiset av og fjernet fra systemet. Systemet kan ikke fullføre tilsetning av løsning. - Trykk på 'Fortsett' for å fortsette, eller trykk på 'Avslutt tilsetning' for å avslutte prosedyren.

AC-fracoblingsfeil

Statuslinje	AC-fracoblingsfeil
Meldingsnummer	3
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Frakobling av donor
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke bekrefte at AC-slangen er sveiset av. Bekreft: - AC-slangen er sveiset av. - AC-slangen er fjernet fra sensoren. - AC-poseden er fjernet fra systemet. Trykk på 'Fortsett.'
Mer informasjon 1	Systemet kan ikke bekrefte at AC-slangen er sveiset av. Bekreft: - AC-slangen er sveiset av. - AC-slangen er fjernet fra sensoren. - AC-poseden er fjernet fra systemet. Trykk på 'Fortsett.'

AC-slange blokkeringsfeil

Statuslinje	AC-slange blokkeringsfeil
Meldingsnummer	9
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Antikoagulantpriming Kjør
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke gi AC. Kontroller AC-slangen for sammenklemminger eller blokkeringer. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Donasjonstid økning (163)

Statuslinje	Donasjonstid økning
Meldingsnummer	163
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Inntaksflyt har blitt redusert. Bekreft: 1. Nålposisjon 2. Giver klemmer 3. Giver er varm Hvis problemer med tilgang løses, kan inntaksflyten øke.
Mer informasjon 1	1. Nålposisjon - Bekreft at nålen er i riktig posisjon i giverens blodåre - Du kan justere giverens armposisjon - Om nødvendig omplasser nålen
Mer informasjon 2	2. Giver klemmer - Gi giveren beskjed om å klemme, bare en lett klem er nødvendig for å hjelpe flyten av blod gjennom giverens åre
Mer informasjon 3	3. Giver er varm - Sørg for at giveren er varm for å unngå venesammentrekning
Mer informasjon 4	Trykk på 'Fortsett' for å gå videre. Hvis problemer med tilgang løses, kan inntaksflyten øke.

Donasjonstid økning (176)

Statuslinje	Donasjonstid økning
Meldingsnummer	176
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Inntaksflyt har blitt redusert. Bekreft: 1. Nålposisjon 2. Giver klemmer 3. Giver er varm Hvis problemer med tilgang løses, kan inntaksflyten øke.
Mer informasjon 1	1. Nålposisjon - Bekreft at nålen er i riktig posisjon i giverens blodåre - Du kan justere giverens armposisjon - Om nødvendig omplasser nålen
Mer informasjon 2	2. Giver klemmer - Gi givoren beskjed om å klemme, bare en lett klem er nødvendig for å hjelpe flyten av blod gjennom giverens åre
Mer informasjon 3	3. Giver er varm - Sørg for at givoren er varm for å unngå venesammentrekning
Mer informasjon 4	Trykk på 'Fortsett' for å gå videre. Hvis problemer med tilgang løses, kan inntaksflyten øke.

Ett minuttspause

Statuslinje	Ett minuttspause
Meldingsnummer	91
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Pumpene har stått i pause i ett minutt. - Sentrifugehastigheten er redusert Trykk på 'Fortsett' for å gå videre.

Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen (35)

Statuslinje	Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen
Meldingsnummer	35
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke bekrefte at klemmene på slanger fra sentrifugeposen er lukket. Bekreft: - Klemmene er lukket riktig - Ingen tilsetningsløsning er tilkoblet Trykk på 'Fortsett.'

Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen (36)

Statuslinje	Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen
Meldingsnummer	36
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke bekrefte at klemmene på slanger fra sentrifugeposen er lukket. Bekreft: - Klemmene er lukket riktig Trykk på 'Fortsett.'

Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen (170)

Statuslinje	Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen
Meldingsnummer	170
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke bekrefte at klemmene på slanger fra sentrifugeposen er lukket. Bekreft: - Klemmene er lukket riktig Trykk på 'Fortsett.'

Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen (171)

Statuslinje	Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen
Meldingsnummer	171
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke bekrefte at klemmene på slanger fra sentrifugeposen er lukket. Bekreft: - Klemmene er lukket riktig Trykk på 'Fortsett.'

Feil på priming av RBC-tilsetningsløsning (80)

Statuslinje	Feil på priming av RBC-tilsetningsløsning
Meldingsnummer	80
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet har ikke registrert væske på sensoren for lavt nivå. Bekreft: - RBC-tilsetningsløsningen er riktig tilkoblet - Brekkstiftene er brutt - Klemmen på overføringsslangen er åpen - Klemmene på slangen fra sentrifugeposen er lukket Trykk på 'Fortsett.'

Feil på priming av RBC-tilsetningsløsning (81)

Statuslinje	Feil på priming av RBC-tilsetningsløsning
Meldingsnummer	81
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet har registrert væske på sensoren for lavt nivå for tidlig. Du kan ha tilkoblet tilsetningsløsning for tidlig. Bekreft: - AC er blitt sveiset av og frakoblet Trykk på 'Fortsett.'

Første syklus feil

Statuslinje	Første syklus feil
Meldingsnummer	67
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Den første inntakssyklusen var for lang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis du oppdager en lekkasje, trykk på 'Avslutt innsamling' for å avslutte prosedyren uten tilbakeføring. - Hvis det er væske i luftposen eller i en produktpose, trykk på 'Tilbakeskylling' for å returnere blodet til giveren og avslutt innsamling. Rengjør sensoren for høyt nivå før den neste prosedyren. Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Giver frakobling-bekreftelsesfeil (52)

Statuslinje	Giver frakobling-bekreftelsesfeil
Meldingsnummer	52
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Frakobling av donor
Tekst på skjermen	<p>Systemet kan ikke bekrefte at giveren er frakoblet</p> <p>Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klemmen på giverslangen er fullstendig lukket - AC-posen er sveiset av og fjernet - Giveren er frakoblet <p>Trykk på 'Fortsett' for å gå videre.</p>
Mer informasjon 1	<p>Systemet kan ikke bekrefte at giveren er frakoblet.</p> <p>Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klemmen for blodoppdeling er helt lukket - AC-posen er sveiset av og fjernet - Giveren er frakoblet <p>Trykk på 'Fortsett' for å gå videre.</p>

Giver frakobling-bekreftelsesfeil (55)

Statuslinje	Giver frakobling-bekreftelsesfeil
Meldingsnummer	55
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Frakobling av donor
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke bekrefte at giveren er frakoblet. Bekreft: - Klemmen på giverslangen er fullstendig lukket - Giveren er frakoblet Trykk på 'Fortsett' for å gå videre.
Mer informasjon 1	Systemet kan ikke bekrefte at giveren er frakoblet. Bekreft: - Klemmen for blodoppdeling er helt lukket - Giveren er frakoblet Trykk på 'Fortsett' for å gå videre.

Giver-frakoblingsfeil (53)

Statuslinje	Giver-fracoblingsfeil
Meldingsnummer	53
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Frakobling av donor
Tekst på skjermen	Frakoblingstesten for giver har mislyktes. Bekreft: 1. Klemmen er lukket 2. Giver er frakoblet 3. AC-posen er sveiset av og fjernet
Mer informasjon 1	1. Klemmen er lukket - Bekreft at klemmen på giverslangen er fullstendig lukket
Mer informasjon 2	1. Klemmen er lukket - Bekreft at klemmen for blodoppdeling er helt lukket
Mer informasjon 3	2. Giver er frakoblet - Bekreft at giverslangen har blitt forseglet og frakoblet
Mer informasjon 4	3. AC-posen er sveiset av og fjernet - Sveis av og fjern AC-posen

Giver-fracoblingsfeil (54)

Statuslinje	Giver-fracoblingsfeil
Meldingsnummer	54
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Frakobling av donor
Tekst på skjermen	Frakoblingstesten for giver har mislyktes. Bekreft: 1. Klemmen er lukket 2. Giver er frakoblet
Mer informasjon 1	1. Klemmen er lukket - Bekreft at klemmen på giverslangen er fullstendig lukket
Mer informasjon 2	1. Klemmen er lukket - Bekreft at klemmen for blodoppdeling er helt lukket
Mer informasjon 3	2. Giver er frakoblet - Bekreft at giverslangen har blitt forseglet og frakoblet

Inntakstrykket for lavt (18)

Statuslinje	Inntakstrykket for lavt
Meldingsnummer	18
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Inntakstrykket er for lavt. - Flythastigheten er midlertidig redusert. Bekreft: 1. Nålposisjon 2. Ingen knekk på slangen 3. Stasebåndtrykk 4. Giver er varm og klemmer
Mer informasjon 1	1. Nålposisjon - Bekreft at nålen er i riktig posisjon i giverens blodåre - Du kan justere giverens armposisjon - Om nødvendig omplasser nålen
Mer informasjon 2	2. Ingen knekk på slangen - Bekreft at slangene fra nålen til kassetten ikke er krøllet eller blokkert
Mer informasjon 3	3. Stasebåndtrykk - Bekreft at stasebåndtrykket er riktig - Se til at stasebåndtrykket er høyt nok til å dilatere venen, men ikke hemmer returflyten
Mer informasjon 4	4. Giver er varm og klemmer - Gi giveren beskjed om å klemme, bare en lett klem er nødvendig for å hjelpe flyten av blod gjennom giverens vene - Sørg for at giveren er varm for å unngå venesammentrekning
Mer informasjon 5	Hvis tidligere anvisninger ikke gir bedre blodflyt, skal du vurdere å justere inntaksflyten. Trykk på 'Juster' for tilgang til justeringsskjermen og for å redusere inntaksflyt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Inntakstrykket for lavt (25)

Statuslinje	Inntakstrykket for lavt
Meldingsnummer	25
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Inntakstrykket er for lavt. Bekreft: 1. Nålposisjon 2. Ingen knekk på slangen 3. Stasebåndtrykk 4. Giver er varm og klemmer
Mer informasjon 1	1. Nålposisjon - Bekreft at nålen er i riktig posisjon i giverens blodåre - Du kan justere giverens armposisjon - Om nødvendig omplasser nålen
Mer informasjon 2	2. Ingen knekk på slangen - Bekreft at slangene fra nålen til kassetten ikke er krøllet eller blokkert
Mer informasjon 3	3. Stasebåndtrykk - Bekreft at stasebåndtrykket er riktig - Se til at stasebåndtrykket er høyt nok til å dilatere venen, men ikke hemmer returflyten
Mer informasjon 4	4. Giver er varm og klemmer - Gi giveren beskjed om å klemme, bare en lett klem er nødvendig for å hjelpe flyten av blod gjennom giverens vene - Sørg for at giveren er varm for å unngå venesammentrekning
Mer informasjon 5	Hvis tidligere anvisninger ikke gir bedre blodflyt, skal du vurdere å justere inntaksflyten. Trykk på 'Juster' for tilgang til justerings skjermen og for å redusere inntaksflyt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Inntakstrykket for lavt (164)

Statuslinje	Inntakstrykket for lavt
Meldingsnummer	164
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Inntakstrykket er for lavt. Bekreft: 1. Nålposisjon 2. Ingen knekk på slangen 3. Stasebåndtrykk 4. Giver er varm og klemmer
Mer informasjon 1	1. Nålposisjon - Bekreft at nålen er i riktig posisjon i giverens blodåre - Du kan justere giverens armposisjon - Om nødvendig omplasser nålen
Mer informasjon 2	2. Ingen knekk på slangen - Bekreft at slangene fra nålen til kassetten ikke er krøllet eller blokkert
Mer informasjon 3	3. Stasebåndtrykk - Bekreft at stasebåndtrykket er riktig - Se til at stasebåndtrykket er høyt nok til å dilatere venen, men ikke hemmer returflyten
Mer informasjon 4	4. Giver er varm og klemmer - Gi giveren beskjed om å klemme, bare en lett klem er nødvendig for å hjelpe flyten av blod gjennom giverens vene - Sørg for at giveren er varm for å unngå venesammentrekning
Mer informasjon 5	Hvis tidligere anvisninger ikke gir bedre blodflyt, skal du vurdere å justere inntaksflyten. Trykk på 'Juster' for tilgang til justerings skjermen og for å redusere inntaksflyt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Kassettfeil

Statuslinje	Kassettfeil
Meldingsnummer	27
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke flytte kassetten til riktig posisjon. Bekreft: - Kassetten er plassert riktig. - Det finns ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen.
Mer informasjon 1	Bekreft at kassetten er plassert riktig.
Mer informasjon 2	Bekreft at det finns ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen.

Lav blodplatekonsentrasjon registrert (78)

Statuslinje	Lav blodplatekonsentrasjon registrert
Meldingsnummer	78
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en lav konsentrasjon i blodplateslangen. - Hvis du ikke ser væske i blodplate- eller plasmalangen, juster for luftblokkering. - Hvis du ikke ser blodplater i produktposen, juster systemets AC-måler oppover.

Lav blodplatekonsentrasjon registrert (186)

Statuslinje	Lav blodplatekonsentrasjon registrert
Meldingsnummer	186
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	

Lekkasje detektorfeil

Statuslinje	Lekkasje detektorfeil
Meldingsnummer	73
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Lekkasjedektoren kan være skadet eller frakoblet. Trykk på 'Fortsett' for å gjenoppta prosedyren. Hvis varselet oppstår flere ganger, skal du ta kontakt med din servicerepresentant.

Lekkasje registrert

Statuslinje	Lekkasje registrert
Meldingsnummer	72
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en lekkasje i sentrifugekammeret. Sjekk sentrifugeposen og sentrifugekammeret for væske. Se i brukerhåndboken for ytterligere anvisninger.

Lekkasjetestfeil

Statuslinje	Lekkasjetestfeil
Meldingsnummer	74
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på
Tekst på skjermen	Lekkasjedektoren må kanskje testes på nytt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren. Hvis lekkasjedektoren ikke består denne testen gjentatte ganger, avslutt innsamlingen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Luft registrert på AC-sensor

Statuslinje	Luft registrert på AC-sensor
Meldingsnummer	7
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Antikoagulantpriming Kjør
Tekst på skjermen	AC ble ikke oppdaget. Bekreft: 1. AC-slangen er satt i 2. AC-posen er tilkoblet på riktig måte. 3. AC-posen ikke er tom.
Mer informasjon 1	1. AC-slangen er satt i - Bekreft at AC-slangen er lagt i AC-sensoren - Legg slangen riktig i sensoren ved å bevege fram og tilbake - Se til at slangen ikke er sammenklemt eller blokkert
Mer informasjon 2	2. AC-posen er tilkoblet på riktig måte. - Bekreft at posens brekkstift er brukket (hvis den er tilstede) - Se til at dråpekammeret er primet
Mer informasjon 3	3. AC-posen ikke er tom - Erstatt AC-posen hvis den er tom

Maksimum prosedyretid er oversteget (168)

Statuslinje	Maksimum prosedyretid er oversteget
Meldingsnummer	168
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Gjeldende prosedyre har blitt diskvalifisert på grunn av nedsatt inntaksflyt. Bekreft: 1. Nålposisjon 2. Giver klemmer 3. Giver er varm Trykk på 'Prosedyrevalg' for å vise skjermbildet for prosedyrevalg.
Mer informasjon 1	1. Nålposisjon - Bekreft at nålen er i riktig posisjon i giverens blodåre - Du kan justere giverens armposisjon - Om nødvendig omplasser nålen
Mer informasjon 2	2. Giver klemmer - Gi givern beskjed om å klemme, bare en lett klem er nødvendig for å hjelpe flyten av blod gjennom giverens åre
Mer informasjon 3	3. Giver er varm - Sørg for at givern er varm for å unngå venesammentrekning
Mer informasjon 4	Trykk på 'Prosedyrevalg' for å fortsette. Hvis problemer med tilgang løses, kan inntaksflyten øke.

Maksimum prosedyretid er oversteget (177)

Statuslinje	Maksimum prosedyretid er oversteget
Meldingsnummer	177
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Gjeldende prosedyre har blitt diskvalifisert. Maksimum prosedyretid har blitt oversteget. Trykk på 'Prosedyrevalg' for å vise skjermbildet for prosedyrevalg.

Maskinvare mislyktes

Statuslinje	Maskinvare mislyktes
Meldingsnummer	32
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Sentrifugen kan ikke oppnå målsatt hastighet. Trykk på 'Fortsett' for å teste på nytt og fortsette prosedyren. Hvis problemet oppstår flere ganger, avslutt prosedyren og ta ut slangesettet.

Motorsvikt (90)

Statuslinje	Motorsvikt
Meldingsnummer	90
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke snu pumpene. Bekreft: - Pumpehodeslangene er ikke blokkert - Kassetten ikke er blokkert Trykk på 'Fortsett' for å teste på nytt og fortsette prosedyren. Hvis problemet oppstår flere ganger, avslutt prosedyren og ta ut slangesettet.

Motorsvikt (156)

Statuslinje	Motorsvikt
Meldingsnummer	156
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke snu pumpene. Bekreft: - Pumpehodeslangene er ikke blokkert - Kassetten ikke er blokkert Trykk på 'Fortsett' for å teste på nytt og fortsette prosedyren. Hvis problemet oppstår flere ganger, avslutt prosedyren og ta ut slangesettet.

Motorsvikt (157)

Statuslinje	Motorsvikt
Meldingsnummer	157
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke snu pumpene. Bekreft: - Pumpehodeslangene er ikke blokkert - Kassetten ikke er blokkert Trykk på 'Fortsett' for å teste på nytt og fortsette prosedyren. Hvis problemet oppstår flere ganger, avslutt prosedyren og ta ut slangesettet.

Motorsvikt (158)

Statuslinje	Motorsvikt
Meldingsnummer	158
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke snu pumpene. Bekreft: - Pumpehodeslangene er ikke blokkert - Kassetten ikke er blokkert Trykk på 'Fortsett' for å teste på nytt og fortsette prosedyren. Hvis problemet oppstår flere ganger, avslutt prosedyren og ta ut slangesettet.

Mulig WBC kontaminasjon registrert (150)

Statuslinje	Mulig WBC kontaminasjon registrert
Meldingsnummer	150
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Det oppstod en hendelse som kan ha forårsaket WBC kontaminasjon. Bekreft WBC i blodplateproduktet Trykk på 'Fortsett' for å vise skjermbildet for prosedyrevalg.

Mulig WBC kontaminasjon registrert (174)

Statuslinje	Mulig WBC kontaminasjon registrert
Meldingsnummer	174
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Det oppstod en hendelse som kan ha forårsaket WBC kontaminasjon. - Bekreft WBC i blodplateproduktet Trykk på 'Fortsett' for å vise skjermbildet for prosedyrevalg.

Nivåsensorfeil (118)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	118
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Væske har blitt oppdaget på sensoren for høyt nivå men ikke på sensoren for lavt nivå. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren. Hvis problemet oppstår flere ganger, velg 'Avslutt innsamling' for å avslutte prosedyren.

Nivåsensorfeil (120)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	120
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har ikke registrert væske på sensoren for høyt nivå på slutten av inntaksyklusen. Bekreft: - Plasma- og blodplateslangene er primet med væske - Slangene er lagt i ventilene på riktig måte
Mer informasjon 1	Inntaksyklusen var for lang. Bekreft at plasma- og blodplateslangene er primet fullstendig med væske. Hvis de ikke primes helt, trykk 'Fortsett' for tilgang til justerings skjermen og trykk 'Luftblokkering' for gjenoppretting.

Nivåsensorfeil (121)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	121
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Inntaksyklusen var for kort. Bekreft: 1. Ingen luft i plasma eller blodplateslanger 2. Slanger er plassert i ventiler
Mer informasjon 1	1. Ingen luft i plasma eller blodplateslanger - Bekreft at plasma- og blodplateslangene er helt fylt med væske - Hvis luft er tilstede, trykk 'Fortsett' for tilgang til justerings skjermen og trykk 'Luftblokkering' for gjenoppretting
Mer informasjon 2	2. Slanger er plassert i ventiler - Kontroller at slangene er lagt i ventilene på riktig måte Hvis de ikke er satt i riktig, velg 'Tilbakeskylling' eller 'Avslutt innsamling'

Nivåsensorfeil (122)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	122
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Retursyklusen var for lang. Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Returslangen ikke inneholder luft - Slangene er lagt i ventilene på riktig måte - Returslangen ikke er sammenklemt eller blokkert - Luftposeslangen ikke er blokkert <p>Hvis du oppdager luft i returslangen, trykk på 'Avslutt innsamling' for å avslutte prosedyren uten tilbakeskylling.</p> <p>Hvis ventilene er korrekt plasserte og luftposeslangen ikke er blokkert, trykk på 'Fortsett.'</p>
Mer informasjon 1	Retursyklusen var for lang. Bekreft at alle slangene er lagt i ventilene på riktig måte.

Nivåsensorfeil (123)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	123
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Retursyklusen var for kort. Gi fronten av returreservoaret noen lette slag med fingertuppen for å fjerne boblene, eller vent for tilstanden å bedres.

Nivåsensorfeil (124)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	124
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har ikke registrert væske på sensoren for høyt nivå på slutten av inntaksyklusen. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Plasma- og blodplateslangene er primet med væske - Slangene er lagt i ventilene på riktig måte - Klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen
Mer informasjon 1	Inntaksyklusen var for lang. Bekreft at plasma- og blodplateslangene er primet fullstendig med væske. Hvis de ikke primes helt, trykk 'Fortsett' for tilgang til justerings skjermen og trykk 'Luftblokkering' for gjenoppretting.
Mer informasjon 2	Inntakssyklusen var for lang. Bekreft at klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen.

Nivåsensorfeil (125)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	125
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Inntaksyklusen var for kort. Bekreft: 1. Ingen luft i plasma eller blodplateslanger 2. Klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen 3. Slang er plassert i ventiler
Mer informasjon 1	1. Ingen luft i plasma eller blodplateslanger - Bekreft at plasma- og blodplateslangene er helt fylt med væske - Hvis luft er tilstede, trykk 'Fortsett' for tilgang til justeringsskjermen og trykk 'Luftblokkering' for gjenoppretting
Mer informasjon 2	2. Klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen. - Bekreft at klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen
Mer informasjon 3	3. Slang er plassert i ventiler - Kontroller at slangene er lagt i ventilene på riktig måte Hvis de ikke er satt i riktig, velg 'Tilbakeskylling' eller 'Avslutt innsamling'

Nivåsensorfeil (126)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	126
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Retursyklusen var for lang. Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Returslangen ikke inneholder luft - Slangene er lagt i ventilene på riktig måte - Returslangen ikke er sammenklemt eller blokkert - Luftposeslangen ikke er blokkert - Klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen <p>Hvis du oppdager luft i returslangen, trykk på 'Avslutt innsamling' for å avslutte prosedyren uten tilbakeskylling. Hvis ventilene er korrekt plasserte og luftposeslangen ikke er blokkert, trykk på 'Fortsett.'</p>
Mer informasjon 1	Retursyklusen var for lang. Bekreft at alle slangene er lagt i ventilene på riktig måte.
Mer informasjon 2	Retursyklusen var for lang. Bekreft at klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen.

Nivåsensorfeil (127)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	127
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Retursyklusen var for kort. Gi fronten av returreservoaret noen lett slag med fingertuppen for å fjerne boblene, eller vent for tilstanden å bedres. Bekreft at klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen.</p>
Mer informasjon 1	Retursyklusen var for kort. Bekreft at klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen.

Nivåsensorfeil (128)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	128
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har ikke registrert væske på sensoren for høyt nivå på slutten av inntaksyklusen. Bekreft: - Plasma- og blodplateslangene er primet med væske - Slangene er lagt i ventilene på riktig måte - Klemmene på slangen fra sentrifugeposen er åpne - Klemmen på PAS-slangen er lukket
Mer informasjon 1	Inntaksyklusen var for lang. Bekreft at plasma- og blodplateslangene er primet fullstendig med væske. Hvis de ikke primes helt, trykk 'Fortsett' for tilgang til justeringsskjermen og trykk 'Luftblokkering' for gjenoppretting.
Mer informasjon 2	Inntakssyklusen var for lang. Bekreft at klemmene på slangene fra sentrifugeposen er åpne.
Mer informasjon 3	Lukk igjen klemmen på PAS-slangen.
Mer informasjon 4	Lukk igjen klemmen på PAS-slangen.

Nivåsensorfeil (129)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	129
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Inntaksyklusen var for kort. Bekreft: 1. Ingen luft i plasma eller blodplateslanger 2. Klemmene på slangen fra sentrifugeposen er åpne 3. Klemmen på PAS-slangen er lukket 4. Slinger er plassert i ventiler
Mer informasjon 1	1. Ingen luft i plasma eller blodplateslanger - Bekreft at plasma- og blodplateslangene er helt fylt med væske - Hvis luft er tilstede, trykk 'Fortsett' for tilgang til justeringsskjermen og trykk 'Luftblokkering' for gjenoppretting
Mer informasjon 2	2. Klemmene på slangen fra sentrifugeposen er åpne - Bekreft at klemmene på slangen fra sentrifugeposen er åpne
Mer informasjon 3	3. Klemmen på PAS-slangen er lukket - Bekreft at klemmen på PAS-slangen er lukket
Mer informasjon 4	3. Klemmen på PAS-slangen er lukket - Bekreft at klemmen på PAS-slangen er lukket
Mer informasjon 5	4. Slinger er plassert i ventiler - Kontroller at slangene er lagt i ventilene på riktig måte Hvis de ikke er satt i riktig, velg 'Tilbakeskylling' eller 'Avslutt innsamling'

Nivåsensorfeil (130)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	130
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Retursyklusen var for lang. Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Returslangen ikke inneholder luft - Slangene er lagt i ventilene på riktig måte - Returslangen ikke er sammenklemt eller blokkert - Luftposeslangen ikke er blokkert - Klemmene på slangen fra sentrifugeposen er åpne <p>Hvis du oppdager luft i returslangen, trykk på 'Avslutt innsamling' for å avslutte prosedyren uten tilbakeskylling. Hvis ventilene er korrekt plasserte og luftposeslangen ikke er blokkert, trykk på 'Fortsett.'</p>
Mer informasjon 1	Retursyklusen var for lang. Bekreft at alle slangene er lagt i ventilene på riktig måte.
Mer informasjon 2	Retursyklusen var for lang. Bekreft at klemmene på slangene fra sentrifugeposen er åpne.
Mer informasjon 3	Lukk igjen klemmen på PAS-slangen.
Mer informasjon 4	Lukk igjen klemmen på PAS-slangen.

Nivåsensorfeil (131)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	131
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Retursyklusen var for kort. Gi fronten av returreervoaret noen lette slag med fingertuppen for å fjerne boblene, eller vent for tilstanden å bedres. Bekreft at klemmene på slangene fra sentrifugeposen er åpne.
Mer informasjon 1	Retursyklusen var for kort. Bekreft at klemmene på slangene fra sentrifugeposen er åpne.
Mer informasjon 2	Lukk igjen klemmen på PAS-slangen.
Mer informasjon 3	Lukk igjen klemmen på PAS-slangen.

Nivåsensorfeil (132)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	132
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har ikke registrert væske på sensoren for høyt nivå på slutten av inntaksyklusen. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Erstatningsløsningsposen er riktig tilkoblet og ikke tom - Plasmaslangen er primet med væske - Slangene er lagt i ventilene på riktig måte
Mer informasjon 1	Hvis du bruker erstatningsløsning, bekreft at erstatningsløsningsposen er tilkoblet på riktig måte.
Mer informasjon 2	Hvis du bruker erstatningsløsning og posen er tom, tilkoble en ny erstatningsløsningspose.
Mer informasjon 3	Inntaksyklusen var for lang. Bekreft at plasmaslangen er primet fullstendig med væske. Hvis de ikke primes helt, trykk 'Fortsett'. Gå til justeringsskjermen og trykk 'Luftblokkering' for gjenoppretting.

Nivåsensorfeil (133)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	133
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har ikke registrert væske på sensoren for høyt nivå på slutten av inntaksyklusen. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Erstatningsløsningsposen er riktig tilkoblet og ikke tom - Plasmaslangen er primet med væske - Slangene er lagt i ventilene på riktig måte - Klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen
Mer informasjon 1	Hvis du bruker erstatningsløsning, bekreft at erstatningsløsningsposen er tilkoblet på riktig måte.
Mer informasjon 2	Hvis du bruker erstatningsløsning og posen er tom, tilkoble en ny erstatningsløsningspose.
Mer informasjon 3	Inntaksyklusen var for lang. Bekreft at plasmaslangen er primet fullstendig med væske. Hvis de ikke primes helt, trykk 'Fortsett'. Gå til justeringsskjermen og trykk 'Luftblokkering' for gjenoppretting.
Mer informasjon 4	Inntakssyklusen var for lang. Bekreft at klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen.

Nivåsensorfeil (178)

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	178
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har ikke oppdaget væske på sensoren for lavt nivå under plasmaoverføring. <ul style="list-style-type: none"> - Bekreft at plasmaslangen ikke er okkludert

Overføringsslangefeil

Statuslinje	Overføringsslangefeil
Meldingsnummer	62
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke bekrefte at klemmen på overføringsslangen er lukket. Lukk klemmen og trykk på 'Fortsett.'

PAS primingsfeil (82)

Statuslinje	PAS primingsfeil
Meldingsnummer	82
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet har registrert tilsetningsløsning for tidlig. Bekreft at klemmene på slanger fra sentrifugeposen er lukket og trykk på 'Fortsett.'

PAS primingsfeil (83)

Statuslinje	PAS primingsfeil
Meldingsnummer	83
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet har ikke oppdaget PAS. Bekreft: - PAS er tilkoblet på riktig måte - At posens brekkstift er brukket (hvis den er tilstede) - Klemmen er åpen - Klemmene på slangen fra sentrifugeposen er lukket Trykk på 'Fortsett.'
Mer informasjon 1	Systemet har ikke oppdaget PAS. Bekreft: - PAS er tilkoblet på riktig måte - At posens brekkstift er brukket (hvis den er tilstede) - Klemmen er åpen - Klemmene på slangen fra sentrifugeposen er lukket Trykk på 'Fortsett.'

PAS primingsfeil (167)

Statuslinje	PAS primingsfeil
Meldingsnummer	167
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet har ikke oppdaget PAS. Bekreft: - PAS er tilkoblet på riktig måte - At posens brekkstift er brukket (hvis den er tilstede) - Klemmen er åpen Trykk på 'Fortsett.'
Mer informasjon 1	Systemet har ikke oppdaget PAS. Bekreft: - PAS er tilkoblet på riktig måte - At posens brekkstift er brukket (hvis den er tilstede) - Klemmen er åpen Trykk på 'Fortsett.'

Pumpefeil

Statuslinje	Pumpefeil
Meldingsnummer	111
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	En pumpe må kanskje testes på nytt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren. Hvis pumpen ikke består denne testen gjentatte ganger, avslutt innsamlingen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Pumper pauset

Statuslinje	Pumper pauset
Meldingsnummer	95
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Pauseknappen ble berørt. - Pumpene har stoppet - Sentrifugen kan fortsette å spinne Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

RBC-detektorfeil

Statuslinje	RBC-detektorfeil
Meldingsnummer	112
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet kunne ikke kalibrere RBC-detektoren. Hvis du fortsetter prosedyren kan ikke systemet sikre leukocyttrduksjon. - Trykk på 'Ta ut' og rengjør RBC-detektoren. - Sett slangesettet i igjen og RBC-detektorens kalibrering vil bli testet på nytt. Hvis detektoren ikke består denne testen gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

RBC-filtertrykk høyt (21)

Statuslinje	RBC-filtertrykk høyt
Meldingsnummer	21
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemtrykket er for høyt. Bekreft: - Klemmen på overføringsslangen er åpen - Slangen ikke er sammenklemt eller blokkert Trykk på 'Fortsett.'

RBC-filtertrykk høyt (23)

Statuslinje	RBC-filtertrykk høyt
Meldingsnummer	23
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Trykket i systemet er fortsatt for høyt. Systemet kan ikke fullføre tilsetning av løsning for RBC-produkt 2. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Trykk på 'Fortsett' for å tilsette løsning til produkt 1. Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

RBC-filtertrykk høyt (24)

Statuslinje	RBC-filtertrykk høyt
Meldingsnummer	24
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemtrykket er for høyt. Bekreft: - Leukocyttreduksjon- filtrene er orientert riktig i braketten. - Filterslangene er lagt inn riktig i braketten. - Slangen ikke er sammenklemt eller blokkert. Trykk på 'Fortsett.'
Mer informasjon 1	Systemtrykket er for høyt. Bekreft: - Klemmen på overføringsslangen er åpen - Slangen ikke er sammenklemt eller blokkert Trykk på 'Fortsett.'

RBC-filtertrykk høyt (165)

Statuslinje	RBC-filtertrykk høyt
Meldingsnummer	165
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemtrykket er for høyt. Bekreft: - Klemmen på overføringsslangen er åpen - Slangen ikke er sammenklemt eller blokkert Trykk på 'Fortsett.'

Returtrykket for høyt (16)

Statuslinje	Returtrykket for høyt
Meldingsnummer	16
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Returtrykket er for høyt. Bekreft: 1. Nålposisjon 2. Ingen knekk på slangen 3. Stasebåndtrykk
Mer informasjon 1	1. Nålposisjon - Bekreft at nålen er plassert riktig - Kontroller for mulig infiltrasjon - Du kan justere giverens armposisjon - Om nødvendig omplasser nålen
Mer informasjon 2	2. Ingen knekk på slangen - Bekreft at slangene fra nålen til kassetten ikke er krøllet eller blokkert
Mer informasjon 3	3. Stasebåndtrykk - Bekreft at stasebåndtrykket er riktig - Se til at stasebåndtrykket ikke hemmer returflyten
Mer informasjon 4	Hvis tidligere anvisninger ikke gir bedre blodflyt, skal du vurdere å justere returflyten. Trykk på 'Juster' for tilgang til justeringsskjermen og for å redusere returflyt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Returtrykket for høyt (19)

Statuslinje	Returtrykket for høyt
Meldingsnummer	19
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Returtrykket er for høyt. Bekreft: 1. Nålposisjon 2. Ingen knekk på slangen 3. Stasebåndtrykk
Mer informasjon 1	1. Nålposisjon - Bekreft at nålen er plassert riktig - Kontroller for mulig infiltrasjon - Du kan justere giverens armposisjon - Om nødvendig omplasser nålen
Mer informasjon 2	2. Ingen knekk på slangen - Bekreft at slangene fra nålen til kassetten ikke er krøllet eller blokkert
Mer informasjon 3	3. Stasebåndtrykk - Bekreft at stasebåndtrykket er riktig - Se til at stasebåndtrykket ikke hemmer returflyten
Mer informasjon 4	Hvis tidligere anvisninger ikke gir bedre blodflyt, skal du vurdere å justere returflyten. Trykk på 'Juster' for tilgang til justeringsskjermen og for å redusere returflyt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Returtrykket for høyt (135)

Statuslinje	Returtrykket for høyt
Meldingsnummer	135
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Returtrykket er for høyt. Bekreft: 1. Nålposisjon 2. Ingen knekk på slangen 3. Stasebåndtrykk
Mer informasjon 1	1. Nålposisjon - Bekreft at nålen er plassert riktig - Kontroller for mulig infiltrasjon - Du kan justere giverens armposisjon - Om nødvendig omplasser nålen
Mer informasjon 2	2. Ingen knekk på slangen - Bekreft at slangene fra nålen til kassetten ikke er krøllet eller blokkert
Mer informasjon 3	3. Stasebåndtrykk - Bekreft at stasebåndtrykket er riktig - Se til at stasebåndtrykket ikke hemmer returflyten
Mer informasjon 4	Hvis tidligere anvisninger ikke gir bedre blodflyt, skal du vurdere å justere returflyten. Trykk på 'Juster' for tilgang til justeringsskjermen og for å redusere returflyt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Sentrifugedør ikke lukket (57)

Statuslinje	Sentrifugedør ikke lukket
Meldingsnummer	57
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Sentrifugedøren er ikke lukket. Bekreft: - Døren ikke er blokkert - Døren er lukket Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Sentrifugedør ikke lukket (183)

Statuslinje	Sentrifugedør ikke lukket
Meldingsnummer	183
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Kjør
Tekst på skjermen	Sentrifugedøren er ikke lukket. Bekreft: - Døren ikke er blokkert - Døren er lukket Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Sentrifugedør åpen

Statuslinje	Sentrifugedør åpen
Meldingsnummer	58
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Sentrifugedøren er ikke lukket. Bekreft: - Døren ikke er blokkert - Døren er lukket Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Sentrifugehastighetsfeil

Statuslinje	Sentrifugehastighetsfeil
Meldingsnummer	69
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en advarselstilstand. Velg en av knappene på skjermen for å gjenoppta prosedyren. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Sentrifugen mislyktes

Statuslinje	Sentrifugen mislyktes
Meldingsnummer	31
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en advarselstilstand. Velg en av knappene på skjermen for å gjenoppta prosedyren. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Sentrifugen stoppet

Statuslinje	Sentrifugen stoppet
Meldingsnummer	140
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Stopp-knappen ble berørt. - Pumpene og sentrifugen ble stoppet Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Sentrifugetemperaturfeil

Statuslinje	Sentrifugetemperaturfeil
Meldingsnummer	92
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en svikt i sentrifugetemperaturen. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Sentrifugetrykk høyt (47)

Statuslinje	Sentrifugetrykk høyt
Meldingsnummer	47
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Trykket i sentrifugen er for høyt. Bekreft: - Slangesløyfen ikke er vridd - RBC-slangen ikke er sammenklemt eller blokkert
Mer informasjon 1	Sjekk at sløyfen ikke er vridd. Bekreft: - Øvre og nedre lager og krager er installert riktig - RBC-slangen ikke er sammenklemt eller blokkert
Mer informasjon 2	Bekreft at sentifugeposen er fullstendig lagt inn under kanten av fillereren.
Mer informasjon 3	Bekreft at inntaksslangen ikke inneholder luft.

Sentrifugetrykk høyt (49)

Statuslinje	Sentrifugetrykk høyt
Meldingsnummer	49
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Trykket i sentrifugen er for høyt. Bekreft: - Slangesløyfen ikke er vridd - RBC-slangen ikke er sammenklemt eller blokkert - Klemmene på slanger fra sentrifugeposen er åpne
Mer informasjon 1	Sjekk at sløyfen ikke er vridd. Bekreft: - Øvre og nedre lager og krager er installert riktig - RBC-slangen ikke er sammenklemt eller blokkert
Mer informasjon 2	Bekreft at sentifugeposen er fullstendig lagt inn under kanten av fillereren.
Mer informasjon 3	Bekreft: - Klemmene på slangen fra sentrifugeposen er åpne - Slangene fra sentrifugeposen ikke er sammenklemt eller blokkerte
Mer informasjon 4	Bekreft at inntaksslangen ikke inneholder luft.

Sentrifuge trykk ligger utenfor område

Statuslinje	Sentrifuge trykk ligger utenfor område
Meldingsnummer	50
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Trykket i sentrifugen ligger utenfor området. Trykk på 'Ta ut' for å heve kassetten. Bekreft: - Kassetten er plassert riktig - Det finnes ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

Sentrifuge trykkfeil

Statuslinje	Sentrifuge trykkfeil
Meldingsnummer	45
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Sensoren for sentrifuge trykk reagerer ikke som forventet. Bekreft: - Klemmene på slangene fra sentrifugeposen er åpne. - Slangene fra sentrifugeposen ikke er sammenklemte eller blokkerte. Trykk på 'Fortsett.' Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Slangesettfeil

Statuslinje	Slangesettfeil
Meldingsnummer	29
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke oppnå målsatt trykk. Bekreft: - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn - Nålen og prøveposens slangeklemmer er lukket og okkluderer slangene - Kassetten er plassert riktig og det ikke er noen blokkeringer Trykk på 'Ta ut' og velg den REF som passer til slangesettet.

Slangesetttypefeil (28)

Statuslinje	Slangesetttypefeil
Meldingsnummer	28
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Den valgte REF samsvarer ikke med slangesettet som er lagt inn. - Trykk på 'Fortsett' - Velg REF som samsvarer med ditt slangesett eller legg inn det riktige slangesettet

Slangesetttypefeil (30)

Statuslinje	Slangesetttypefeil
Meldingsnummer	30
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	RBC-detektoren kjenner ikke igjen slangesetttypen. - Rengjør RBC-detektoren. - Bekreft at det fins ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen og sett i slangesettet på nytt. - Hvis slangesettet ikke består denne testen gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Strømbrudd (104)

Statuslinje	Strømbrudd
Meldingsnummer	104
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på
Tekst på skjermen	Strømmen til systemet ble avbrutt under oppsamlingsprosedyren. Velg en av knappene på skjermen for å gjenoppta prosedyren.

Strømbrudd (105)

Statuslinje	Strømbrudd
Meldingsnummer	105
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på
Tekst på skjermen	Strømmen til systemet ble avbrutt under oppsamlingsprosedyren. Velg en av knappene på skjermen for å gjenoppta prosedyren.

Strømtesten mislyktes

Statuslinje	Strømtesten mislyktes
Meldingsnummer	107
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Strømforsyningen må kanskje testes på nytt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren. Hvis strømforsyningen ikke består denne testen gjentatte ganger, avslutt innsamlingen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Systemtrykk høyt (40)

Statuslinje	Systemtrykk høyt
Meldingsnummer	40
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Trykket i sentrifugen er for høyt. Velg 'Tilbakeskylling' for å returnere blodet til givern eller velg 'Avslutt innsamling' for å avslutte prosedyren uten tilbakeføring. Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Systemtrykk høyt (41)

Statuslinje	Systemtrykk høyt
Meldingsnummer	41
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Trykket i sentrifugen er for høyt. Bekreft: - RBC-slangen ikke er sammenklemt eller blokkert - Klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen
Mer informasjon 1	Bekreft: - Klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen - Slangene fra sentrifugeposen ikke er sammenklemt eller blokkerte
Mer informasjon 2	Bekreft at inntaksslangen ikke inneholder luft.

Systemtrykk høyt (42)

Statuslinje	Systemtrykk høyt
Meldingsnummer	42
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Trykket i sentrifugen er for høyt. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klemmene på slangene fra sentrifugeposen er åpne. - Slangene fra sentrifugeposen ikke er sammenklemte eller blokkerte. <p>Oppsamling for RBC-produkt 1 kan ikke fullføres. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette med produkt 2. Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>

Systemtrykk høyt (43)

Statuslinje	Systemtrykk høyt
Meldingsnummer	43
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Høyt trykk ble oppdaget.</p> <p>Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klemmen(e) på slangen fra sentrifugeposen er åpne - Filteret/filtrene er orientert riktig i braketten - Filterslangene er lagt inn riktig i braketten - Filterslangene ikke er sammenklemte eller blokkerte

Systemtrykk høyt (44)

Statuslinje	Systemtrykk høyt
Meldingsnummer	44
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Trykket i sentrifugen er for høyt. Avslutt innsamlingen. Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Systemtrykk høyt (48)

Statuslinje	Systemtrykk høyt
Meldingsnummer	48
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Trykket i sentrifugen er for høyt. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Slangesløyfen ikke er vridd - RBC-slangen ikke er sammenklemt eller blokkert - Klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen
Mer informasjon 1	Sjekk at sløyfen ikke er vridd. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Øvre og nedre lager og krager er installert riktig - RBC-slangen ikke er sammenklemt eller blokkert
Mer informasjon 2	Bekreft at sentrifugeposen er fullstendig lagt inn under kanten av fillerens.
Mer informasjon 3	Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Klemmen på slangen fra sentrifugeposen er åpen - Slangene fra sentrifugeposen ikke er sammenklemt eller blokkerte
Mer informasjon 4	Bekreft at inntaksslangen ikke inneholder luft.

Systemtrykk høyt (1078)

Statuslinje	Systemtrykk høyt
Meldingsnummer	1078
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Trykket i sentrifugen er for høyt. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Slangesløyfen ikke er vridd - RBC-slangen ikke er sammenklemt eller blokkert - Klemmene på slanger fra sentrifugeposen er åpne
Mer informasjon 1	Sjekk at sløyfen ikke er vridd. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Øvre og nedre lager og krager er installert riktig - RBC-slangen ikke er sammenklemt eller blokkert
Mer informasjon 2	Bekreft at sentrifugeposen er fullstendig lagt inn under kanten av fillerens.
Mer informasjon 3	Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Klemmene på slangen fra sentrifugeposen er åpne - Slangene fra sentrifugeposen ikke er sammenklemt eller blokkerte
Mer informasjon 4	Bekreft at inntaksslangen ikke inneholder luft.

Ta ut kassett-feil

Statuslinje	Ta ut kassett-feil
Meldingsnummer	146
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke ta ut kassetten fra sin nåværende posisjon. Koble fra giveren. Se i brukerhåndboken for anvisninger om hvordan du tar ut kassetten manuelt.

Ti minutterspause

Statuslinje	Ti minutterspause
Meldingsnummer	141
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Pumpene har stått i pause i ti minutter. Sentrifugen ble stoppet. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Tiltak kreves

Statuslinje	Tiltak kreves
Meldingsnummer	110
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Et tiltak kreves. Trykk på 'Fortsett' for å gå tilbake til forrige skjermbildet.

Tre minutters pause

Statuslinje	Tre minutters pause
Meldingsnummer	79
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Pumpene har stått i pause i 3 minutter. Trykk på 'Fortsett' for å returnere 3 ml blod til giveren. Returnering av blod sikrer at blodet i nålslangen er antikoagulert og givertilgang er opprettholdt.

Trykklettelsesfeil

Statuslinje	Trykklettelsesfeil
Meldingsnummer	66
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Slangesettet har mislyktes å lette testtrykk. Kontroller AC-slangen for sammenklemminger eller blokkeringer. Bekreft at AC-filteret er tørt. Når du er klar, trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Trykksensoren mislyktes

Statuslinje	Trykksensoren mislyktes
Meldingsnummer	14
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en advarselstilstand. Velg 'Tilbakeføring' hvis det er et alternativ. Velg 'Avslutt innsamling' for å avslutte prosedyren.

Trykktestfeil (1)

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	1
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Klemmene på giverslangen og slangen til prøveposen er lukket - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig og det ikke er noen blokkeringer
Mer informasjon 1	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Lukk igjen klemmen for blodoppdeling - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig og det ikke er noen blokkeringer
Mer informasjon 2	Bekreft at klemmen på giverslangen (1) og klemmen på prøveposeslangen (2) er fullstendig lukket.
Mer informasjon 3	<ul style="list-style-type: none"> - Bekreft at klemmen for blodoppdeling er lukket - Hvis det er luft i prøveposen, trykk ut luften.
Mer informasjon 4	Bekreft at alle pumpeslangene er lagt inn på riktig måte ved å undersøke hver pumpe og forsiktig stryk fingeren rundt kanten på hver pumpehode.
Mer informasjon 5	Bekreft at kassetten er plassert riktig.
Mer informasjon 6	Sjekk bak kassetten for blokkeringer. Trykk på 'Ta ut' for å heve kassetten.

Trykktestfeil (2)

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	2
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Klemmene på giverslangen og slangen til prøveposen er lukket - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig - Det finnes ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn
Mer informasjon 1	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Lukk igjen klemmen for blodoppdeling - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig - Det finnes ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn
Mer informasjon 2	<ul style="list-style-type: none"> - Sjekk at klemmen for blodoppdeling er lukket - Hvis det er luft i prøveposen, trykk ut luften.
Mer informasjon 3	Hvis luft er i prøveposen, åpne klemmen på giverslangen (1) og prøveposens klemme (2) og slipp ut luften. Etter at luften har blitt sluppet ut, lukk giverslangeklemmen (1) og prøveposens klemme (2).
Mer informasjon 4	Bekreft at alle pumpeslangene er lagt inn på riktig måte ved å undersøke hver pumpe og forsiktig stryk fingeren rundt kanten på hver pumpehode.
Mer informasjon 5	Bekreft at kassetten er plassert riktig.
Mer informasjon 6	Sjekk bak kassetten for blokkeringer. Trykk på 'Ta ut' for å heve kassetten.

Trykktestfeil (60)

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	60
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Hvis giveren er tilkoblet, frakoble giveren, deretter ta ut og kast slangesettet. Hvis giveren ikke er tilkoblet, bekreft: - Klemmen på giverslangen er åpen - Prøveposen ikke er fylt med luft Hvis prøveposen er fylt med luft, åpne klemmene på giverslangen og slipp ut luften.
Mer informasjon 1	Hvis giveren er tilkoblet, frakoble giveren, deretter ta ut og kast slangesettet. Hvis giveren ikke er tilkoblet, bekreft: - Prøveposen ikke er fylt med luft Hvis det er luft i prøveposen, trykk ut luften.

Trykktestfeil (63)

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	63
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Klemmene på giverslangen og slangen til prøveposen er lukket - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig og det ikke er noen blokkeringer
Mer informasjon 1	Hvis luft er i prøveposen, åpne klemmen på giverslangen (1) og prøveposens klemme (2) og slipp ut luften. Etter at luften har blitt sluppet ut, lukk giverslangeklemmen (1) og prøveposens klemme (2).
Mer informasjon 2	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Lukk igjen klemmen for blodoppdeling - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig og det ikke er noen blokkeringer
Mer informasjon 3	- Sjekk at klemmen for blodoppdeling er lukket - Hvis det er luft i prøveposen, trykk ut luften.
Mer informasjon 4	Bekreft at alle pumpeslangene er lagt inn på riktig måte ved å undersøke hver pumpe og forsiktig stryk fingeren rundt kanten på hver pumpehode.
Mer informasjon 5	Bekreft at kassetten er plassert riktig.
Mer informasjon 6	Sjekk bak kassetten for blokkeringer. Trykk på 'Ta ut' for å heve kassetten.

Trykktestfeil (64)

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	64
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	<p>Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klemmene på giverslangen og slangen til prøveposen er lukket - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig - Det finnes ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn
Mer informasjon 1	<p>Hvis luft er i prøveposen, åpne klemmen på giverslangen (1) og prøveposens klemme (2) og slipp ut luften.</p> <p>Etter at luften har blitt sluppet ut, lukk giverslangeklemmen (1) og prøveposens klemme (2).</p>
Mer informasjon 2	<p>Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lukk igjen klemmen for blodoppdeling - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig - Det finnes ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn
Mer informasjon 3	<ul style="list-style-type: none"> - Sjekk at klemmen for blodoppdeling er lukket - Hvis det er luft i prøveposen, trykk ut luften.
Mer informasjon 4	Bekreft at alle pumpeslangene er lagt inn på riktig måte ved å undersøke hver pumpe og forsiktig stryk fingeren rundt kanten på hver pumpehode.
Mer informasjon 5	Bekreft at kassetten er plassert riktig.
Mer informasjon 6	Sjekk bak kassetten for blokkeringer. Trykk på 'Ta ut' for å heve kassetten.

Trykktestfeil (65)

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	65
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	<p>Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klemmene på giverslangen og slangen til prøveposen er lukket - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig og det ikke er noen blokkeringer - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn - Klemmen på overføringsslangen er åpen
Mer informasjon 1	<p>Hvis luft er i prøveposen, åpne klemmen på giverslangen (1) og prøveposens klemme (2) og slipp ut luften.</p> <p>Etter at luften har blitt sluppet ut, lukk giverslangeklemmen (1) og prøveposens klemme (2).</p>
Mer informasjon 2	<p>Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lukk igjen klemmen for blodoppdeling - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig og det ikke er noen blokkeringer - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn - Klemmen på overføringsslangen er åpen
Mer informasjon 3	<ul style="list-style-type: none"> - Sjekk at klemmen for blodoppdeling er lukket - Hvis det er luft i prøveposen, trykk ut luften.
Mer informasjon 4	Bekreft at alle pumpeslangene er lagt inn på riktig måte ved å undersøke hver pumpe og forsiktig stryk fingeren rundt kanten på hver pumpehode.
Mer informasjon 5	Bekreft at kassetten er plassert riktig.
Mer informasjon 6	Sjekk bak kassetten for blokkeringer. Trykk på 'Ta ut' for å heve kassetten.

Trykktestfeil (154)

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	154
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Hvis giveren er tilkoblet, frakoble giveren, deretter ta ut og kast slangesettet. Hvis giveren ikke er tilkoblet, bekreft: - Klemmen på giverslangen er åpen - Prøveposen ikke er fylt med luft Hvis prøveposen er fylt med luft, åpne klemmene på giverslangen og slipp ut luften.
Mer informasjon 1	Hvis giveren er tilkoblet, frakoble giveren, deretter ta ut og kast slangesettet. Hvis giveren ikke er tilkoblet, bekreft: - Prøveposen ikke er fylt med luft Hvis det er luft i prøveposen, trykk ut luften.

Trykktestfeil (184)

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	184
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Klemmene på giverslangen og slangen til prøveposen er lukket - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig - Det finnes ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn
Mer informasjon 1	Hvis luft er i prøveposen, åpne klemmen på giverslangen (1) og prøveposens klemme (2) og slipp ut luften. Etter at luften har blitt sluppet ut, lukk giverslangeklemmen (1) og prøveposens klemme (2).
Mer informasjon 2	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Lukk igjen klemmen for blodoppdeling - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig og det ikke er noen blokkeringer
Mer informasjon 3	<ul style="list-style-type: none"> - Sjekk at klemmen for blodoppdeling er lukket - Hvis det er luft i prøveposen, trykk ut luften.
Mer informasjon 4	Bekreft at alle pumpeslangene er lagt inn på riktig måte ved å undersøke hver pumpe og forsiktig stryk fingeren rundt kanten på hver pumpehode.
Mer informasjon 5	Bekreft at kassetten er plassert riktig.
Mer informasjon 6	Sjekk bak kassetten for blokkeringer. Trykk på 'Ta ut' for å heve kassetten.

Trykktestfeil (185)

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	185
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Klemmene på giverslangen og slangen til prøveposen er lukket - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig - Det finnes ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn
Mer informasjon 1	Hvis luft er i prøveposen, åpne klemmen på giverslangen (1) og prøveposens klemme (2) og slipp ut luften. Etter at luften har blitt sluppet ut, lukk giverslangeklemmen (1) og prøveposens klemme (2).
Mer informasjon 2	Systemet kan ikke opprettholde trykk. Bekreft: <ul style="list-style-type: none"> - Lukk igjen klemmen for blodoppdeling - Prøveposen inneholder ikke luft - Pumpeslangene er lagt inn riktig - Kassetten er plassert riktig - Det finnes ingen blokkeringer bak kassetten eller kassettholderen - Den valgte REF samsvarer med slangesettet som er satt inn
Mer informasjon 3	<ul style="list-style-type: none"> - Sjekk at klemmen for blodoppdeling er lukket - Hvis det er luft i prøveposen, trykk ut luften.
Mer informasjon 4	Bekreft at alle pumpeslangene er lagt inn på riktig måte ved å undersøke hver pumpe og forsiktig stryk fingeren rundt kanten på hver pumpehode.
Mer informasjon 5	Bekreft at kassetten er plassert riktig.
Mer informasjon 6	Sjekk bak kassetten for blokkeringer. Trykk på 'Ta ut' for å heve kassetten.

Ventilfeil (38)

Statuslinje	Ventilfeil
Meldingsnummer	38
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Blodplateventilen er ikke i riktig posisjon. Sjekk blodplateventilen for blokkeringer. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Ventilfeil (103)

Statuslinje	Ventilfeil
Meldingsnummer	103
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en plasmaventil som ikke er i riktig posisjon. Sjekk plasmaventilen for blokkeringer. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Ventilfeil (113)

Statuslinje	Ventilfeil
Meldingsnummer	113
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en RBC-ventil som ikke er i riktig posisjon. Sjekk RBC-ventilen for blokkeringer. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Ventilfeil (147)

Statuslinje	Ventilfeil
Meldingsnummer	147
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	En ventil må kanskje testes på nytt. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren. Hvis ventilen ikke består denne testen gjentatte ganger, avslutt innsamlingen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Ventilfeil (148)

Statuslinje	Ventilfeil
Meldingsnummer	148
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet kan ikke flytte en ventil til den riktige posisjonen. Sjekk ventilene for blokkeringer. Trykk på 'Fortsett' for å fortsette prosedyren.

Væske registrert på AC-sensor

Statuslinje	Væske registrert på AC-sensor
Meldingsnummer	8
Meldingstype	Varsel
Oppstår under	Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Systemet registrerte væske på AC-sensoren. Bekreft: - AC-slangen er sveiset av. - AC-slangen er fjernet fra sensoren. - AC-posen er fjernet fra systemet. Trykk på 'Fortsett.'

Alarmer

Systemtest mislyktes

Statuslinje	Systemtest mislyktes
Meldingsnummer	70, 136, 137, 155, 172, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1079, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 32768, 32769, 32770, 32771, 32772, 32773, 32774, 32775, 32776, 32777, 32778, 32779, 32780, 32785, 32786, 32798, 32799, 32800, 32805, 32806, 32807, 32808, 32809, 32810, 32815, 32816, 32817, 32818, 32824, 32825, 32826, 32827, 32828, 32829,
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Giver informasjon Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen (70)	Systemet har registrert en varseltilstand. Noter statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Koble fra giveren. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.
Tekst på skjermen (137)	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm. - Trykk på 'Avslutt innsamling' - Koble fra giveren Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.
Tekst på skjermen (172)	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm. - Trykk på 'Avslutt innsamling' eller 'Tilbakeføring' hvis tilgjengelig Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koble fra giveren - Slå av systemet og slå det deretter på igjen <p>Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>
--------------------------	--

Spenningsfeil

Statuslinje	Spenningsfeil
Meldingsnummer	88, 89, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	<p>Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag</p>
Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trykk på 'Avslutt innsamling' - Koble fra giveren <p>Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>

(4) AC-frakobling mislyktes

Statuslinje	AC-frakobling mislyktes
Meldingsnummer	4
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Frakobling av donor
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet kan ikke verifisere at AC er sveiset av og fjernet fra systemet. - Trykk på 'Avslutt tilsetning'

(5) Væske på AC-sensor mislyktes

Statuslinje	Væske på AC-sensor mislyktes
Meldingsnummer	5
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. AC kan ha blitt koblet til for raskt. - Trykk på 'Avslutt innsamling' - Ta ut og kast slangesettet Hvis AC ikke var tilkoblet, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(6) Væske ikke registrert på AC-sensor

Statuslinje	Væske ikke registrert på AC-sensor
Meldingsnummer	6
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet registrerer ikke AC på AC-sensoren. Avslutt innsamlingen og koble fra giveren.

(10) Blokkert AC-slange mislyktes

Statuslinje	Blokkert AC-slange mislyktes
Meldingsnummer	10
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Antikoagulantpriming
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten. Kast slangesettet. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(11) Tilgang trykksensor mislyktes

Statuslinje	Tilgang trykksensor mislyktes
Meldingsnummer	11
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(12) Tilgang trykksensor mislyktes

Statuslinje	Tilgang trykksensor mislyktes
Meldingsnummer	12
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(13) Tilgang trykksensor mislyktes

Statuslinje	Tilgang trykksensor mislyktes
Meldingsnummer	13
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(22) RBC-filtertrykk høyt

Statuslinje	RBC-filtertrykk høyt
Meldingsnummer	22
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Trykket i systemet er fortsatt for høyt. Systemet kan ikke fullføre tilsetning av løsning. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Trykk på 'Avslutt tilsetning.' Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(33) Sentrifugen mislyktes

Statuslinje	Sentrifugen mislyktes
Meldingsnummer	33
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm. - Koble fra giveren - Slå av systemet og slå det deretter på igjen Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(37) Sentrifugeposevolum for høyt

Statuslinje	Sentrifugeposevolum for høyt
Meldingsnummer	37
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Automatisk løsningstilsetning
Tekst på skjermen	Gjenværende sentrifugeposevolum er for høyt. Systemet kan ikke fullføre tilsetning av løsningen. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Trykk på 'Avslutt tilsetning.' Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(46) Systemtrykk høyt

Statuslinje	Systemtrykk høyt
Meldingsnummer	46
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Trykket i sentrifugen er for høyt. Systemet kan ikke fullføre tilsetning av løsningen. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Trykk på 'Avslutt tilsetning.' Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(61) Trykktest mislyktes

Statuslinje	Trykktest mislyktes
Meldingsnummer	61
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Trykktesten for giver har mislyktes tre ganger. Systemet kan ikke oppnå målsatt trykk. - Trykk på 'Avslutt innsamling' Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(68) Første syklus mislyktes

Statuslinje	Første syklus mislyktes
Meldingsnummer	68
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten.</p> <p>Systemet har registrert væske på sensoren for høyt nivå raskere enn ventet.</p> <p>- Trykk på 'Avslutt innsamling'</p> <p>Hvis alarmer oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>

(71) Sentrifugeposevolum for høyt

Statuslinje	Sentrifugeposevolum for høyt
Meldingsnummer	71
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Sentrifugeposevolumet er for høyt. Systemet kan ikke fullføre tilsetning av løsningen.</p> <p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Trykk på 'Avslutt tilsetning.' Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>

(75) Væske registrert før priming mislyktes

Statuslinje	Væske registrert før priming mislyktes
Meldingsnummer	75
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten.</p> <p>Systemet har registrert væske på sensoren for lavt nivå tidligere enn ventet. Hvis du ser væske på sensor for lavt nivå, ble AC koblet til for raskt.</p> <p>- Slå av systemet og slå det deretter på igjen</p> <p>Hvis du ikke ser væske på sensor for lavt nivå eller alarmer oppstår flere ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>

(76) Sensor for lavt nivå mislyktes

Statuslinje	Sensor for lavt nivå mislyktes
Meldingsnummer	76
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Koble fra giveren. Bekreft at returpumpehodeslangen er korrekt lagt inn. Bekreft at alle pumperotorer er i riktig posisjon og plassert riktig. Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(77) Væske registrert for raskt

Statuslinje	Væske registrert for raskt
Meldingsnummer	77
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Koble fra giveren. - Hvis du ser væske på sensor for lavt nivå, ble AC koblet til for raskt. - Hvis du ikke ser væske på sensor for lavt nivå, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(93) Sentrifugetemperaturfeil

Statuslinje	Sentrifugetemperaturfeil
Meldingsnummer	93
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en svikt i sentrifugetemperaturen. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(96) RBC overløp

Statuslinje	RBC overløp
Meldingsnummer	96
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en varseltilstand. Noter statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Koble fra giveren. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(106) Strømbrydd

Statuslinje	Strømbrydd
Meldingsnummer	106
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på
Tekst på skjermen	Strømmen til systemet ble avbrutt under oppsamlingsprosedyren. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Velg 'Avslutt innsamling' for å avslutte prosedyren. Hvis problemet oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(109) AC-priming mislyktes

Statuslinje	AC-priming mislyktes
Meldingsnummer	109
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Antikoagulantpriming
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet kan ikke opprettholde trykk under AC-priming. Giver slangens og prøveposelangens klemmer kan ha blitt åpnet for tidlig. - Trykk på 'Avslutt innsamling' - Bekreft at giveren er frakoblet Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(134) Nivåsensor mislyktes

Statuslinje	Nivåsensor mislyktes
Meldingsnummer	134
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Den første retursyklusen tok lenger enn forventet. - Trykk på 'Avslutt innsamling' Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(142) Ti minutterspause

Statuslinje	Ti minutterspause
Meldingsnummer	142
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Pumpene har vært i pause i ti minutter under inntakssyklus uten flyt gjennom giverslangen. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Koble fra giveren.

(143) Nivåsensor mislyktes

Statuslinje	Nivåsensor mislyktes
Meldingsnummer	143
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm. - Avslutt innsamlingen - Koble fra giveren Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis denne alarmen oppstår gjentatte ganger.

(144) Nivåsensorfeil

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	144
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm. - Avslutt innsamlingen - Koble fra giveren Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis denne alarmen oppstår gjentatte ganger.

(145) Nivåsensor mislyktes

Statuslinje	Nivåsensor mislyktes
Meldingsnummer	145
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avslutt innsamlingen - Koble fra giveren <p>Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis denne alarmen oppstår gjentatte ganger.</p>

(149) Blodpriming mislyktes

Statuslinje	Blodpriming mislyktes
Meldingsnummer	149
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten.</p> <p>Systemet har registrert en uopprettelig alarm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trykk på 'Avslutt innsamling' - Koble fra giveren

(162) Trykktestfeil

Statuslinje	Trykktestfeil
Meldingsnummer	162
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Sett inn
Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten.</p> <p>Trykktesten for giver har mislyktes tre ganger. Systemet kan ikke oppnå målsatt trykk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trykk på 'Avslutt innsamling' <p>Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>

(179) Inntakslange okklusjon oppdaget

Statuslinje	Inntakslange okklusjon oppdaget
Meldingsnummer	179
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm. - Trykk på 'Avslutt innsamling'

(187) Nivåsensorfeil

Statuslinje	Nivåsensorfeil
Meldingsnummer	187
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har ikke oppdaget væske på sensoren for lavt nivå under plasmaoverføring. - Bekreft at plasmaslangen ikke er okkludert

(1060) Oppstart mislyktes

Statuslinje	Oppstart mislyktes
Meldingsnummer	1060
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på
Tekst på skjermen	System oppstartprotokoll mislyktes. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten om nødvendig. Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(1087) Oppsamlingsventil for lenge åpen

Statuslinje	Oppsamlingsventil for lenge åpen
Meldingsnummer	1087
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Oppsamlingsventilen var åpen for lenge. Lukk igjen klemmen på blodplateproduktet. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Avslutt innsamlingen. Koble fra giveren.

(32781) Sentrifugehastighet mislyktes

Statuslinje	Sentrifugehastighet mislyktes
Meldingsnummer	32781
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32782) Sentrifugen mislyktes

Statuslinje	Sentrifugen mislyktes
Meldingsnummer	32782
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32783) Ventilsensor eller dørsensor mislyktes

Statuslinje	Ventilsensor eller dørsensor mislyktes
Meldingsnummer	32783
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32784) Nivåsensor mislyktes

Statuslinje	Nivåsensor mislyktes
Meldingsnummer	32784
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert væske på sensoren for lavt nivå tidligere enn ventet. - Koble fra giveren - Slå av systemet og slå det deretter på igjen Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32787) Sensor for lavt nivå mislyktes

Statuslinje	Sensor for lavt nivå mislyktes
Meldingsnummer	32787
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koble fra giveren - Slå av systemet og slå det deretter på igjen <p>Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>

(32788) Inntakspumpe mislyktes

Statuslinje	Inntakspumpe mislyktes
Meldingsnummer	32788
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	<p>Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag</p>
Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten.</p> <p>Blodplatepumperotoren kan være plassert i inntaksrotorhuset, eller inntakspumpen kan være feil satt i.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Sørg for at pumperotoren med den svarte prikken ikke er satt i inntaksrotorhuset <p>Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.</p>

(32789) Inntakspumpe mislyktes

Statuslinje	Inntakspumpe mislyktes
Meldingsnummer	32789
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Inntakspumperotoren kan være feil plassert. - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Plasser rotoren i inntakspumpen på nytt Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32790) Returpumpe mislyktes

Statuslinje	Returpumpe mislyktes
Meldingsnummer	32790
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Retur-pumperotoren kan være feil plassert. - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Plasser rotoren på returpumpen på nytt Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32791) Returpumpe mislyktes

Statuslinje	Returpumpe mislyktes
Meldingsnummer	32791
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Retur-pumperotoren kan være feil plassert. - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Plasser rotoren på returpumpen på nytt Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32792) AC-pumpe mislyktes

Statuslinje	AC-pumpe mislyktes
Meldingsnummer	32792
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Blodplatepumperotoren kan være plassert i AC-rotorhuset, eller AC-pumpen kan være feil satt i. - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Sørg for at pumperotoren med den svarte prikken ikke er satt i blodplaterotorhuset Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32793) AC-pumpe mislyktes

Statuslinje	AC-pumpe mislyktes
Meldingsnummer	32793
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. AC-pumperotoren kan være feil plassert. - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Plasser rotoren i AC-pumpen på nytt Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32794) Plasmapumpe mislyktes

Statuslinje	Plasmapumpe mislyktes
Meldingsnummer	32794
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Blodplatepumperotoren kan være plassert i plasmarotorhuset, eller plasmapumpen kan være feil satt i. - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Sørg for at pumperotoren med den svarte prikken ikke er satt i plasmarotorhuset Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32795) Plasmapumpe mislyktes

Statuslinje	Plasmapumpe mislyktes
Meldingsnummer	32795
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Plasmapumperotoren kan være feil plassert. - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Plasser rotoren i plasmapumpen på nytt Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32796) Blodplatepumpe mislyktes

Statuslinje	Blodplatepumpe mislyktes
Meldingsnummer	32796
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Blodplatepumperotoren kan være feil plassert eller en feil pumperotor kan være plassert i blodplaterotorhuset. - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Plasser rotoren i blodplatepumpen på nytt Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32797) Blodplatepumpe mislyktes

Statuslinje	Blodplatepumpe mislyktes
Meldingsnummer	32797
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut Sammendrag
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Blodplatepumperotoren kan være feil plassert eller en feil pumperotor kan være plassert i blodplaterotorhuset. - Slå av systemet og slå det deretter på igjen - Sørg for at pumperotoren med den svarte prikken er satt i blodplaterotorhuset Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32802) Sentrifugedør ikke lukket

Statuslinje	Sentrifugedør ikke lukket
Meldingsnummer	32802
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm. - Koble fra giveren - Slå av systemet og slå det deretter på igjen Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32803) Kassettheving mislyktes

Statuslinje	Kassettheving mislyktes
Meldingsnummer	32803
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør Frakobling av donor
Tekst på skjermen	<p>Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koble fra giveren - Slå av systemet og slå det deretter på igjen <p>Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Hvis alarmen oppstår gjentatte ganger, kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>

(32804) Priming mislyktes

Statuslinje	Priming mislyktes
Meldingsnummer	32804
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Sett inn Antikoagulantpriming
Tekst på skjermen	<p>Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen.</p> <p>Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.</p>

(32811) AC-pumpe mislyktes

Statuslinje	AC-pumpe mislyktes
Meldingsnummer	32811
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32812) Ventilfeil

Statuslinje	Ventilfeil
Meldingsnummer	32812
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32813) Ventilfeil

Statuslinje	Ventilfeil
Meldingsnummer	32813
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32814) Ventilfeil

Statuslinje	Ventilfeil
Meldingsnummer	32814
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Strøm på Sett inn Antikoagulantpriming Kjør Frakobling av donor Automatisk løsningstilsetning Ta ut
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32819) Første syklus mislyktes

Statuslinje	Første syklus mislyktes
Meldingsnummer	32819
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32820) Kassett mislyktes

Statuslinje	Kassett mislyktes
Meldingsnummer	32820
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

(32821) AC-pumpe bevegelse mislyktes

Statuslinje	AC-pumpe bevegelse mislyktes
Meldingsnummer	32821
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Systemet har registrert en uopprettelig alarm. - Koble fra giveren - Slå av systemet og slå det deretter på igjen Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når det er slått på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp hvis alarmen oppstår gjentatte ganger.

(32823) Returpumpe mislyktes

Statuslinje	Returpumpe mislyktes
Meldingsnummer	32823
Meldingstype	Alarm
Oppstår under	Kjør
Tekst på skjermen	Systemet har registrert en uopprettelig alarm. Noter alarmnummeret og statuslinjeteksten. Koble fra giveren. Slå av systemet og slå det deretter på igjen. Systemet vil verifisere at giveren er frakoblet og heve kassetten når strømmen er på igjen. Kontakt din servicerepresentant for å få hjelp.

Indeks

A

Alarm

AC-frakobling mislyktes (4) 77
AC-priming mislyktes (109) 84
AC-pumpe bevegelse mislyktes (32821) 99
AC-pumpe mislyktes (32792) 92
AC-pumpe mislyktes (32793) 93
AC-pumpe mislyktes (32811) 97
Blodplatepumpe mislyktes (32796) 94
Blodplatepumpe mislyktes (32797) 95
Blodpriming mislyktes (149) 86
Blokkert AC-slange mislyktes (10) 78
Første syklus mislyktes (32819) 99
Første syklus mislyktes (68) 81
Inntakslange okklusjon oppdaget (179) 87
Inntakspumpe mislyktes (32788) 90
Inntakspumpe mislyktes (32789) 91
Kassett mislyktes (32820) 99
Kassettheving mislyktes (32803) 96
Nivåsensor mislyktes (134) 84
Nivåsensor mislyktes (143) 85
Nivåsensor mislyktes (145) 86
Nivåsensor mislyktes (32784) 89
Nivåsensorfeil (144) 85
Nivåsensorfeil (187) 87
Oppsamlingsventil for lenge åpen (1087) 88
Oppstart mislyktes (1060) 87
Plasmapumpe mislyktes (32794) 93
Plasmapumpe mislyktes (32795) 94
Priming mislyktes (32804) 96
RBC overløp (96) 83
RBC-filtertrykk høyt (22) 79
Returpumpe mislyktes (32790) 91
Returpumpe mislyktes (32791) 92
Returpumpe mislyktes (32823) 100
Sensor for lavt nivå mislyktes (32787) 90
Sensor for lavt nivå mislyktes (76) 82
Sentrifugedør ikke lukket (32802) 95
Sentrifugehastighet mislyktes (32781) 88
Sentrifugen mislyktes (32782) 88
Sentrifugen mislyktes (33) 79
Sentrifugeposevolum for høyt (37) 80
Sentrifugeposevolum for høyt (71) 81
Sentrifugetemperaturfeil (93) 83

Spenningsfeil

(88) (89) (97) (98) (99) (100) (101) (102) 76

Strømbrydd (106) 84

Systemtest mislyktes

(70) (136) (137) (155) (172) (1001) (1002) (1003) (1004)
(1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012)
(1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020)
(1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028)
(1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036)
(1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1045)
(1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053)
(1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1061) (1062)
(1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070)
(1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1079) (1081)
(1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1088) (1089) (1090)
(1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098)
(1099) (32768) (32769) (32770) (32771) (32772) (32773)
(32774) (32775) (32776) (32777) (32778) (32779) (32780)
(32785) (32786) (32798) (32799) (32800) (32805) (32806)
(32807) (32808) (32809) (32810) (32815) (32816) (32817)
(32818) (32824) (32825) (32826) (32827) (32828) (32829) 75

Systemtrykk høyt (46) 80

Ti minutterspause (142) 85

Tilgang trykksensor mislyktes (11) 78

Tilgang trykksensor mislyktes (12) 78

Tilgang trykksensor mislyktes (13) 79

Trykktest mislyktes (61) 80

Trykktestfeil (162) 86

Væske ikke registrert på AC-sensor (6) 77

Væske på AC-sensor mislyktes (5) 77

Væske registrert før priming mislyktes (75) 81

Væske registrert for raskt (77) 82

Ventilfeil (32812) 97

Ventilfeil (32813) 98

Ventilfeil (32814) 98

Ventilsensor eller dørsensor mislyktes (32783) 89

R

Rådgivende melding

Bytt PAS-posen 7

Dobbel RBC oppdelingsadvarsel 7

Erstatt RBC-tilsetningsløsningsposen 7, 8
Kan ikke identifisere slangesettetype 8
RBC oppdaget 9
Tilkoble erstatningsløsning 9, 10

V

Varsel

AC-frakobling mislyktes 11
AC-frakoblingsfeil 11
AC-slange blokkeringsfeil 12
Donasjonstid økning 12, 13
Ett minuttspause 13
Feil på klemmen på slangen fra sentrifugeposen 14, 15
Feil på priming av RBC-tilsetningsløsning 15
Første syklus feil 16
Giver frakobling-bekreftelsesfeil 16, 17
Giver-fracoblingsfeil 18, 19
Inntakstrykket for lavt 20–22
Kassetfeil 23
Lav blodplatekonsentrasjon registrert 23
Lekkasje detektorfeil 24
Lekkasje registrert 24
Lekkasjetestfeil 25
Luft registrert på AC-sensor 25
Maksimum prosedyretid er oversteget 26
Maskinvarer mislyktes 27
Motorsvikt 27–29
Mulig WBC kontaminasjon registrert 29, 30
Nivåsensorfeil 30–40

Overføringslangefeil 41
PAS primingsfeil 41–43
Pumpefeil 43
Pumper pauset 44
RBC-detektorfeil 44
RBC-filtertrykk høyt 45, 46
Returtrykket for høyt 47–49
Sentrifugedør åpen 51
Sentrifugedør ikke lukket 50
Sentrifugehastighetsfeil 51
Sentrifugen mislyktes 51
Sentrifugen stoppet 52
Sentrifuge temperaturfeil 52
Sentrifuge trykk høyt 53
Sentrifuge trykk ligger utenfor område 54
Sentrifuge trykk feil 54
Slangesettfeil 55
Slangesetttypefeil 55
Strømbrydd 56
Strømtesten mislyktes 56
Systemtrykk høyt 57–60
Ta ut kasset-feil 60
Ti minutterspause 61
Tiltak kreves 61
Tre minutters pause 61
Trykklettelsesfeil 62
Trykksensoren mislyktes 62
Trykktestfeil 63–71
Væske registrert på AC-sensor 74
Ventilfeil 72–74