

Digival avleser for hurtigtester

Validering
31974



Vi «samkjører» manuell avlesning mot DIGIVAL avleser før den tas i bruk.

1. Log på som **lab** , trykk OK
2. Trykk **LES AV TEST**
3. Scan **strekoden på folieposen**
4. Scan **labnummer**
5. Bekreft med **OK**

Nå kan testen klargjøres før den legges inn i skuffen

Samtidig setter du klokka på 15 minutter

Etter 15 min leser DIGIVAL av testen, åpne skuffen og les av manuelt i tillegg

Labnummer	STREPTOKOKK		LEGIONELLA		Dato/sign
	Manuelt svar	Digival avleser	Manuelt svar	Digival avleser	
47082261			NEG	NEG	21.5/HE/19
47082792	NEG	NEG			23.9
47085192	NEG	NEG			29/9 (A)
47085238			NEG	NEG	29/9 (B)
47087153	NEG	NEG	NEG	NEG	5/10 ANB
47089104	NEG	NEG			10/10 HIG
47089238	NEG	NEG			12/10 CA
47089776	NEG	NEG			12/10 EB
47089787	NEG	NEG			12/10 AUB
47091421	NEG	NEG			17/10 TL0
47091664					
47098738	NEG	NEG			
47098766	NEG	NEG	NEG	NEG	27/11-2019
47108252	NEG	NEG			
47108316	NEG	NEG			

M
30/12-20
G