






Oversikt over desinfeksjonsmidler

Revidert 01.03.24

Produkt	Smittestoff	Bruksområde	Virketid	Kommentar
<p><b>LifeClean Desinfeksjon</b></p>  <p>Klordioksid &lt;0,2%</p>	<p><b>Alle agens.</b> Bakterier, Virus/Norovirus, HPV-virus, Sopp, sporer, Mykobakterier, Clostridium Difficile</p>	<p><u>Alle</u> overflater (synlig rene) og alle typer utstyr</p> <p>Ved følsom overflate (plast, elektronisk utstyr etc.) bør middelet vaskes av etter endt desinfeksjon.</p> <p>* Kan misfarge rustfritt stål og hvit plast.</p>	<p><b>2 min.</b> <b>(5 min. på sporer)</b></p> <p>Trenger normalt ikke å skylle/tørkes av men <u>Obs:</u> <b>Alt medisinsk utstyr</b> skal skylles og tørkes av etter endt desinfeksjon. Skyll av flaten/utstyret med <b>sterilt vann</b> etter endt desinfeksjon <u>dersom utstyret skal i kontakt med slimhinne.</u></p>	<p>Ferdigblandet klordioksidløsning.</p> <p>Merk flasken med anbruddsdato. Holdbar i 4 uker etter anbrudd. Væsken skal være strågul.</p>
<p><b>Alkoholer (Etanol/isopropanol)</b> Min 70%</p>  <p>Finnes også som store kluter 12pk og små, enkeltpakkede kluter.</p>	<p><b>De fleste agens, bortsett fra: Mykobakterier, Clostridium og Norovirus.</b></p>	<p>Desinfeksjon av synlig rent utstyr og mindre flater.</p> <p>* Bør ikke brukes på gummi, pleksiglass og enkelte typer plast, da det kan skade overflaten.</p>	<p><b>1-2 min.</b></p> <p>Overflaten skal være fuktig/ha væskefilm under hele desinfeksjonstiden. Påføres evt flere ganger.</p> <p>Lufttørke.</p>	<p>Ufortynnet bruksløsning.</p> <p>Holdbar 4 uker etter anbrudd.</p>
<p><b>SaniSwiss desinfeksjonskluter</b></p>	<p><b>De fleste agens.</b></p>	<p>Kan brukes på rene, samt synlig /ikke synlig forurensede overflater.</p>	<p><b>5 min.</b></p>	<p>Holdbarhet åpnet pakke: 2 mnd</p>

<p>Prefuktet engangsklut (hydrogenperoksid og pereddiksyre)</p> 	<p>Bakterier, virus (også Norovirus), sopp, mycobakterier og sporer (f.eks. Clostridium Diff.)</p>		<p><b>Sporer 15 min.</b></p>	<p>Bruk nitrilhansker. Sorteres som farlig avfall.</p>
<p><b>Perasafe</b> Danner pereddiksyreioner</p> 	<p><b>Alle agens.</b> Bakterier, Virus/Norovirus, Sopp, sporer, Mykobakterier, Clostridium Difficile</p>	<p><u>Alle</u> overflater (synlig rene) og alle typer utstyr</p>	<p><b>10 min.</b> Tørk/skyll av flaten/utstyret etter endt desinfeksjon.</p>	<p><b>1 pose blandes i 1 l lunkent vann</b> Løsningen er holdbar i 24 timer etter utblanding. Skiftes min. daglig.  Bruk nitrilhansker, munnbind og øyebeskyttelse ved utblanding og påføring.</p>
<p><b>Virkon</b> Oksidasjonsmiddel med rengjøringskomponent</p> 	<p><b>De fleste agens.</b> <b>Bortsett fra: Mykobakterier og Clostridium</b></p>	<p><u>Alle</u> overflater (synlig rene) og de fleste typer utstyr.  * IKKE godkjent for optisk utstyr. * Kan misfarge messing, kobber, aluminium og mykmetaller.</p>	<p><b>10 min.</b>  <u>Synlig forurensede flater/utstyr:</u> <b>30 min</b> Tørk/skyll av flaten/utstyret etter endt desinfeksjon</p>	<p>En tablett utblandes i 500 ml temperert vann.</p>